



Pulsante/spia	Funzionamento
1	All'accensione della spia gialla: è in corso un programma. Il display mostra la fase di pulizia attuale e la temperatura.
2	All'accensione della spia verde: il programma è stato completato. La spia verde si spegne quando viene aperto il portellone e sul display appare la temperatura massima del ciclo.
3	All'accensione della spia rossa: la macchina non ha raggiunto la temperatura di disinfezione o si è verificato un altro errore (codice di errore F).
4	Display.
5	Apertura/chiusura portellone.
6	Sensore per l'apertura/chiusura del portellone e per l'avvio del programma preselezionato.

	U1/U4	Detergente in esaurimento
	U7	Avvertenza alta temperatura dei presidi

Per messaggi di errore di tipo F, consultare le istruzioni per l'uso.