



Modifiche all'interfaccia utente

Versione software v1.0 Sara Plus PCB

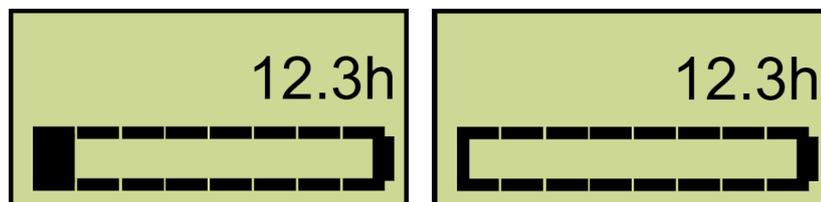


Se, durante il movimento, l'indicazione della batteria passa da carica elevata a una o a zero barre, la batteria inizia a essere scarica (può comunque essere utilizzata fino a scaricarsi completamente).
Sostituire e caricare completamente la batteria.

Notare che l'allarme acustico per batteria scarica è stato ridotto a due secondi dopo il rilascio di tutti i pulsanti.

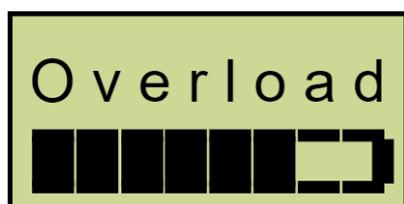

Se si verifica un sovraccarico, non è possibile avviare il movimento nella stessa direzione per quattro secondi.

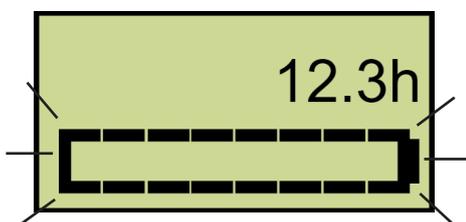

Se l'indicatore della batteria lampeggia, la batteria è considerata esaurita.
Sostituire e riciclare la batteria secondo le linee guida locali.