


Endringer i brukergrensesnittet

Programvareversjon v1.0 Sara Plus PCB

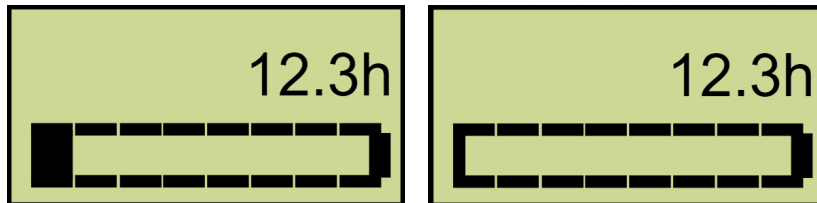


Hvis batteriindikatoren faller fra høy lading til én eller null streker på indikatoren mens en bevegelse utføres, begynner batterinivået å bli lavt (det kan fortsatt brukes til det er helt utladet). Skift batteriet og lad det helt opp.

Vær oppmerksom på at pipesignalet for utladet batteri er forkortet til to sekunder etter at alle knappene er sluppet.



Hvis det oppstår overbelastning, er det ikke mulig å starte bevegelsen i samme retning før etter fire sekunder.

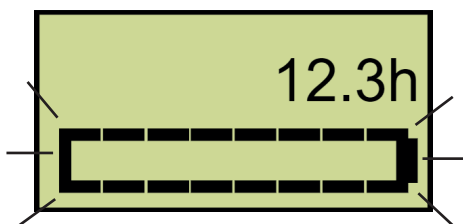

Hvis batteriindikatoren blinker, er batteriet oppbrukt. Emballasjen skal gjenvinnes i henhold til lokale bestemmelser.