


## Изменения в интерфейсе пользователя

Программное обеспечение Sara Plus PCB, версия 1.0

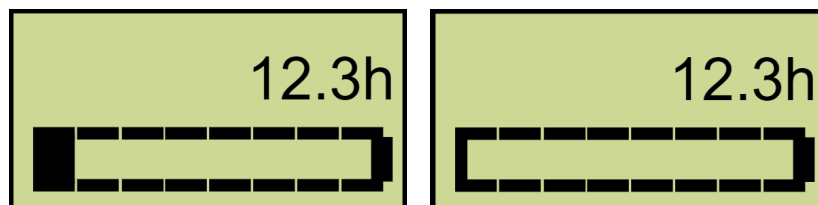


Если во время движения заряд аккумулятора падает с высокого уровня до единицы или нуля, аккумулятор начинает изнашиваться (его можно использовать до полной разрядки). Замените и полностью зарядите аккумулятор.

Обратите внимание, что длительность сигнала зуммера о разрядке аккумулятора после отпускания всех кнопок сокращена до двух секунд.



При перегрузке невозможно начать движение в том же направлении в течение четырех секунд.

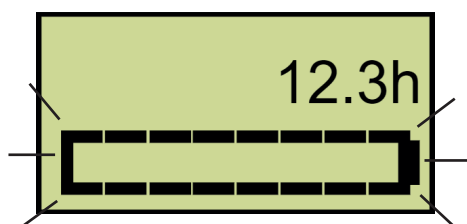

Если индикатор аккумулятора мигает, ресурс аккумулятора считается израсходованным. Замените и утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными правилами.