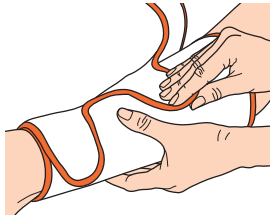
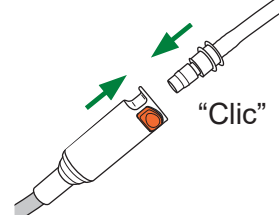
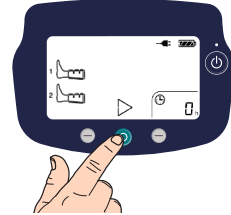


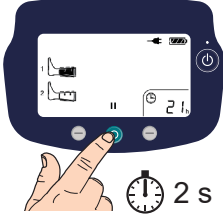
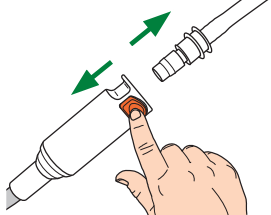

Flowtron ACS900



Avvio terapia

<p>1</p>  <p>Far indossare il gambale al paziente.</p>	<p>2</p>  <p>Collegare il gambale alla pompa.</p>	<p>3</p>  <p>Premere il pulsante centrale per avviare.</p>
--	---	--

Interruzione terapia

<p>1</p>  <p>Tenere premuto il pulsante centrale.</p>	<p>2</p>  <p>Scollegare il gambale dalla pompa.</p>	<p>3</p>  <p>Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere la pompa.</p>
---	---	--

Letture del timer trattamento paziente: ore e minuti (dalla versione software 2.210)

<p>1</p>  <p>Le ore vengono visualizzate quando la pompa è accesa. (12 h)</p>	<p>2</p>  <p>Premere il pulsante destro per visualizzare i minuti.</p>  <p>I minuti vengono visualizzati per 5 secondi. (-14 = 14 min).</p>	<p>3</p>  <p>Le ore vengono visualizzate di nuovo automaticamente. Tempo di compressione = 12 ore, 14 minuti.</p>
--	---	--

Ripristino timer trattamento paziente: ore e minuti

<p>1</p>  <p>Tenere premuto il pulsante destro.</p>	<p>2</p>  <p>Tenere premuto il pulsante centrale per reimpostare il tempo a 0.</p>	<p>3</p>  <p>Premere il pulsante destro per salvare la nuova impostazione.</p>
---	--	--

Per regolare il volume dell'allarme acustico

<p>1</p>  <p>Premere il pulsante sinistro.</p>	<p>2</p>  <p>Premere il pulsante centrale per regolare il volume.</p>	<p>3</p>  <p>Premere il pulsante sinistro per salvare.</p>
--	---	--