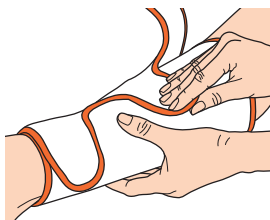


# Flowtron ACS900

## Therapie starten

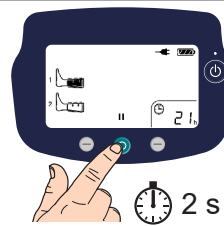
- 

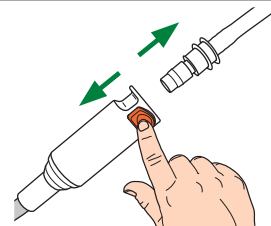
Breng de manchet aan bij de zorgvrager.
- 

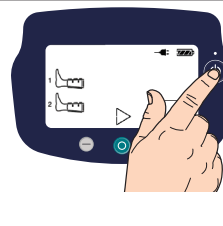
Sluit de manchet aan op de pomp.
- 

Druk op de middelste bedieningsknop om te starten.

## Therapie stoppen

- 

Houd de middelste bedieningsknop ingedrukt.
- 

Koppel de manchet los van de pomp.
- 

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de pomp uit te schakelen.

## Het aantal uren therapie per zorgvrager aflezen — uren en minuten (van softwareversie 2.210)

- 

Uren worden getoond wanneer de pomp wordt ingeschakeld. (12 h)
- 

Druk op de rechter bedieningsknop om de minuten weer te geven.



Minuten worden gedurende 5 seconden weergegeven (-14 = 14 min).
- 

De uren worden automatisch opnieuw weergegeven. Compressietijd = 12 uren, 14 minuten.

## Aantal uren therapie per zorgvrager resetten — uren en minuten

- 

Houd de rechter bedieningsknop ingedrukt.
- 

Houd de middelste bedieningsknop ingedrukt om op 0 te resetten.
- 

Druk op de rechter bedieningsknop om de nieuwe instelling op te slaan.

## Volume-instelling van het akoestisch alarmsignaal wijzigen

- 

Druk op de linker bedieningsknop.
- 

Houd de middelste bedieningsknop ingedrukt om het volume aan te passen.
- 

Druk op de linker bedieningsknop om op te slaan.