

Flowtron ACS900

Start behandling

1

Sett mansjetten på pasienten.

2

"Klikk"

Koble mansjetten til pumpen.

3

Trykk på den midtre betjeningsknappen for å starte.

Stopp behandling

1

Hold inne den midtre betjeningsknappen. 2s

2

Koble mansjetten fra pumpen.

3

Hold inne av/på-knappen for å slå av pumpen. 2s

Les av pasientens driftstimer – timer og minutter (fra programvareversjon 2.210)

1

Timene vises hvis pumpen er slått på. (12 t)

2

Trykk på høyre betjeningsknapp for å vise minutter. 1s

Minuttene vises i 5 sekunder. (-14 = 14 min). 5s

3

Telleren går automatisk tilbake til å vise timer. Kompresjonstid = 12 timer, 14 minutter.

Tilbakestill pasientens driftstimer – timer og minutter

1

Hold inne den høyre betjeningsknappen. 2s

2

Hold inne den midtre betjeningsknappen for å tilbakestille til 0. 3s

3

Trykk på den høyre betjeningsknappen for å lagre den nye innstillingen.

Endre voluminnstilling for lydalarm

1

Trykk på den venstre betjeningsknappen. 2s

2

Trykk på den midtre betjeningsknappen for å endre volumet.

3

Trykk på den venstre betjeningsknappen for å lagre.