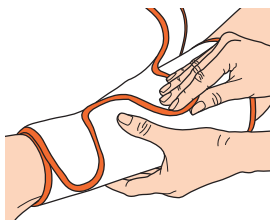
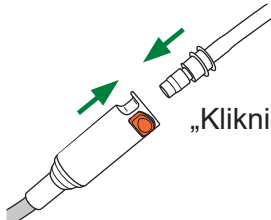
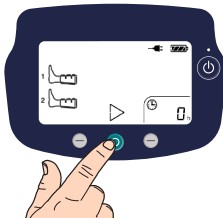


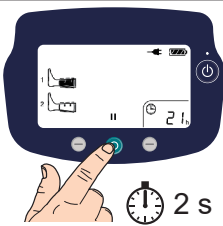
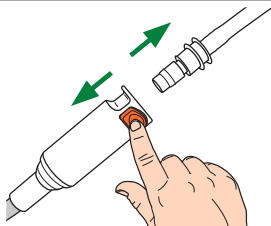
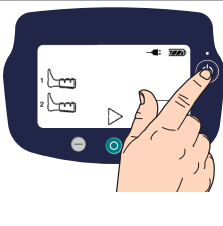
Flowtron ACS900



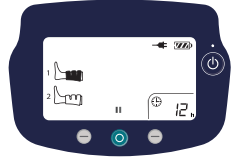
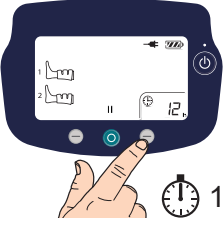


Rozpocznij leczenie

<p>1</p>  <p>Założ mankiet pacjentowi.</p>	<p>2</p>  <p>„Kliknięcie“</p> <p>Podłącz mankiet do pompy.</p>	<p>3</p>  <p>Naciśnij środkowy przycisk sterowania, aby rozpocząć.</p>
--	--	--

Zakończ leczenie

<p>1</p>  <p>Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk sterowania. 2 s</p>	<p>2</p>  <p>Odłącz mankiet od pompy.</p>	<p>3</p>  <p>Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć pompę. 2 s</p>
---	---	---

Odczytaj czas zastosowania u pacjenta — w godzinach i minutach (od wersji oprogramowania 2.210)

<p>1</p>  <p>Godziny są wyświetlane, kiedy pompa jest podłączona do zasilania (12 h).</p>	<p>2</p>  <p>Naciśnij prawy przycisk sterowania, aby wyświetlić minuty. 1 s</p>  <p>Minuty są wyświetlane przez 5 sekund (-14 = 14 min.). 5 s</p>	<p>3</p>  <p>Następnie automatycznie przywracane jest wyświetlanie godzin. Czas kompresji = 12 godzin, 14 minut.</p>
--	---	---

Reset czasu stosowania u pacjenta — godziny i minuty

<p>1</p>  <p>Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk sterowania. 2 s</p>	<p>2</p>  <p>Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk sterowania, aby zresetować do 0. 3 s</p>	<p>3</p>  <p>Naciśnij prawy przycisk sterowania, aby zapisać nowe ustawienie.</p>
--	--	---

Zmiana głośności alarmu dźwiękowego

<p>1</p>  <p>Naciśnij lewy przycisk sterowania. 2 s</p>	<p>2</p>  <p>Naciśnij środkowy przycisk sterowania, aby zmienić głośność.</p>	<p>3</p>  <p>Naciśnij lewy przycisk sterowania, aby zapisać.</p>
---	---	--