

Flowtron ACS900



Запуск терапии

1

Наденьте манжету на пациента.

2

«Щелчок»
Присоедините манжету к насосу.

3

Нажмите среднюю кнопку управления для запуска терапии.

Остановка терапии

1

Нажмите и удерживайте среднюю кнопку управления. 2 с

2

Отсоедините манжету от насоса.

3

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отключить насос. 2 с

Чтение данных таймера использования системы пациентом — часы и минуты (начиная с версии ПО 2.210)

1

Часы отображаются при каждом включении насоса. (12 ч)

2

Нажмите правую кнопку управления, чтобы отобразилось значение в минутах. 1 с

Минуты отображаются в течение 5 секунд. (-14 = 14 мин). 5 с

3

Отображение часов восстановится автоматически. Время компрессии = 12 часов, 14 минут.

Сброс таймера использования системы пациентом — часы и минуты

1

Нажмите и удерживайте правую кнопку управления. 2 с

2

Чтобы сбросить значение до 0, нажмите и удерживайте среднюю кнопку управления. 3 с

3

Для сохранения нового значения нажмите правую кнопку управления.

Регулировка громкости звукового сигнала

1

Нажмите левую кнопку управления. 2 с

2

Чтобы изменить громкость, нажмите среднюю кнопку управления.

3

Для сохранения нажмите левую кнопку управления.