

# Alpha Trancell Deluxe

Denna snabbreferensguide har tagits fram som en hjälp för vårdpersonal och andra användare. Här behandlas endast systemets olika funktioner. Guiden ersätter inte de allmänna säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder och rekommendationer som beskrivs i produktens instruktioner för användning, delnummer 500934SE.

Läs produktens kompletta instruktioner för användning innan du börjar använda produkten.

## Indikationer:



- Alpha Prevent™-systemet är indicerat för förebyggande och behandling av trycksår upp till och med kategori 2<sup>1</sup>. Högsta patientvikt 90 kg.
- Alpha Trancell® Deluxe-systemen är indicerade för förebyggande och/eller hantering av trycksår i alla kategorier<sup>1</sup> när de kombineras med ett individanpassat och heltäckande program för trycksårsbehandling.
- Madrasserna *Alpha Trancell Deluxe* och *Trancell II®* är utformade för patienter med en vikt på upp till 120 kg (264 lb).
- Sittkudden *Alpha Trancell Deluxe* är utformad för patienter med en vikt på mellan 40 och 90 kg (198 lb).

**Kontraindikationer:** Använd inte detta system för patienter med instabila ryggradsfrakturer.

**Akta:** Om patienten har andra instabila frakturer eller tillstånd som kan kompliceras av en mjuk eller rörlig yta, bör du rådgöra med lämplig läkare innan användning.



Strömbrytaren sitter på pumpens sida.

- Tryck på  för att slå på pumpen och på  för att stänga av pumpen.
- För att återställa pumpens larm, stäng av pumpen och slå sedan på den igen.
- För att koppla bort pumpen från elnätet, stäng först av pumpen och dra sedan ut kontakten ur eluttaget.



Ström På-indikatorn tänds när pumpen är i Körläget.



Vänta-indikatorn är tänd när madrassersättningen, toppmadrassen eller sittkudden blåses upp. Indikatorn förblir tänd tills systemet har fyllts helt med luft.




Indikatorn för lågt tryck blinkar så snart pumpen detekterar lågt tryck i madrassen eller sittkudden och ett larm ljuder. Indikatorn slocknar så snart normalt tryck har uppnåtts.

Kontrollera att pluggen för snabbtömning av luft vid huvudändan är ordentligt isatt och att slangsetet är korrekt anslutet.




Vid strömavbrott börjar indikatorn för strömavbrott att blinka och ett larm ljuder. Larmets tonhöjd ökar allt eftersom. Om strömmen kommer tillbaka slutar larmet låta, men larmlampan fortsätter att vara tänd tills systemet återställs (endast Storbritannien).

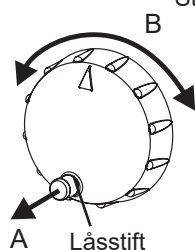

Trycket i madrassen eller sittkudden kan justeras till den individuella patientvikten med hjälp av viktinställningen. Roter viktinställningen medurs för att öka trycket och moturs för att minska trycket.

Viktinställningen är låst i läge för att förhindra oavsiktlig vridning. Justera viktinställningens läge på följande sätt:

1. Dra ut låsstiftet (A) för att frigöra reglaget.
2. Roter reglaget (B) medan låsstiftet är utdraget.
3. Släpp låsstiftet igen när viktinställningen står i önskat läge för att låsa reglaget.

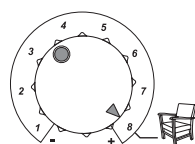

Se patientviktguiden på baksidan av pumpen för korrekt viktinställning:

- Om patienten sitter på madrassen ska du öka viktinställningen med två steg.
- Om patienten sitter på en sittkudde ska du sätta viktinställning i det högsta läget (8) såsom visas i figuren här intill.


**Varning:** Viktguiden är bara en indikation och får inte ersätta kliniska bedömningar.

1. NPUAP/EPUAP International Pressure Ulcer Guideline, 2009.

## Installation

### Toppmadrass

Placera toppmadrassen ovanpå den befintliga madrassen med slangsetet nära sängens fotände. Madrassöverdraget ska placeras överst.

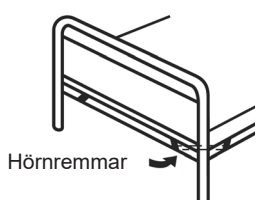

**Observera:** Placera inte toppmadrassen direkt på sängbotten.

Fäst toppmadrassen genom att stoppa in fästflikarna under båda ändarna av madrassen och/eller fäst hörnremmarna under varje hörn av bäddmadrassen.

### Madrassersättning (MR)

Ta bort den befintliga madrassen och placera madrassersättningen på sängramen. Se till att slanguppsättningen hamnar vid sängens fotände. Madrassöverdraget måste placeras överst.

Se till att madrassen är ordentligt fastspänd på sängramen med de medföljande remmarna.

### Slutför installationen av madrassersättningen och madrassöverdraget på följande sätt

Se till att pluggen för snabbtömning har satts i vid huvudändan (ej tillämpligt för *Alpha Prevent*).

Se till att snabbtömningsfliken alltid är synlig och lättillgänglig och att den inte riskerar att fastna någonstans.

För *Alpha Trancell Deluxe*-madrasserna enbart, gäller att transportkontrollen ska vara inställd på Normal.

### Seat Cushion (Sittdyna)


Placera sittkudden ovanpå stolsitsen. Ställ dig framför stolen, vänd mot den, och kontrollera att cellerna är vända uppåt och att slanguppsättningen kommer ut från sittkuddens främre högra hörn.

Använd inte *Alpha Trancell Deluxe* sittkudde utan att ha en skumdyna under den.

Använd alltid *Alpha Trancell Deluxe* sittkudde med det skyddande överdraget.

Undvik att kablar ligger längs golvet. Se till att kabeln och slangsetet är placerade under stolen för att undvika olyckstillbud.

### Montering av pumpen:

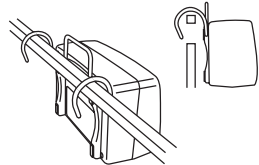

Placera pumpen med halkskyddet nedåt på en lämplig plan yta, eller häng upp den på skenan vid fotändan av sängen med hjälp av de utsvängbara upphängningskrokarna.

Anslut slangsetet till pumpen. Se till att luftinmatningsslangarna inte är böjda eller vridna.

Säkerställ att elkabel och slangset är placerade så att man inte kan snubbla på eller strypas av dem och att de inte kan fastna i sängmekanismen eller i något annat.

Sätt i elkabelns stickkontakt i ett lämpligt vägguttag.

### Sänggrindar

När det gäller användning av sänggrindar ska du alltid följa lokala riktlinjer OCH produktens instruktioner för användning.

® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen.

© Arjo 2022.

Vår policy är att ha en kontinuerlig produktutveckling och vi förbehåller oss därför rätten att ändra konstruktioner och specifikationer utan att meddela detta i förväg. Innehållet i detta dokument får inte kopieras vare sig helt eller delvis utan tillstånd från Arjo.

## Snabbstart:

Tryck på strömbrytaren för att slå på pumpen. Indikatorerna Ström På och Vänta lyser medan systemet fylls med luft.

Det tar cirka 10–15 minuter för madrassen och 2–3 minuter för sittkudden att blåsas upp helt. Indikatorn Vänta släcks när de är helt fyllda med luft.

Placera ett lakan över madrassen och vik in det löst.


När patienten har placerats på madrassen/sittkudden, justera trycket med hjälp av viktinställningen. Se patientviktguiden på baksidan av pumpen för korrekt inställning.

Om patienten sitter upp i sängen ska du öka viktinställningen med två steg.

## Transportläge

Patienten kan transporteras på *Alpha Trancell Deluxe* madrass och madrassöverdrag.

1. Vrid reglaget 90 grader som visas nedan.
2. Koppla loss slangsetet från pumpen.
3. Stäng av pumpen.

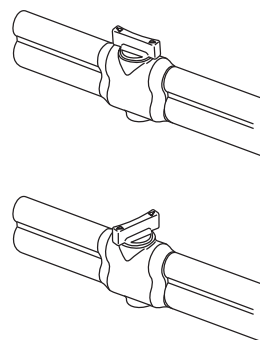

Trycket i cellerna kommer att utjämnas och patienten får fortfarande stöd av madrassen (som nu är statisk) upp till 2 timmar med patienten i liggande position.

För att utnyttja transportfunktionen optimalt, ställ in madrassen och madrassöverdraget i transportläge när alla celler är fyllda med luft. Se till att patienten förblir i liggande position.


## SNABBTÖMNING AV LUFT

### VID HJÄRTSTILLESTÅND

Om patienten drabbas av hjärtstillestånd och HLR behöver utföras:

#### Aktivera snabbtömning av luft:

Dra bestämt i fliken för snabbtömning vid huvudändan av madrassen och koppla ur slanguppsättningens anslutningar till pumpen.

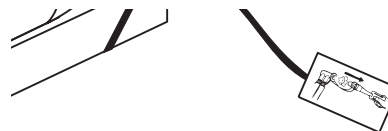

#### För att återställa snabbtömning av luft:

Sätt i pluggen ordentligt och anslut luftslangarna till pumpen igen.

