


Flowtron ACS900

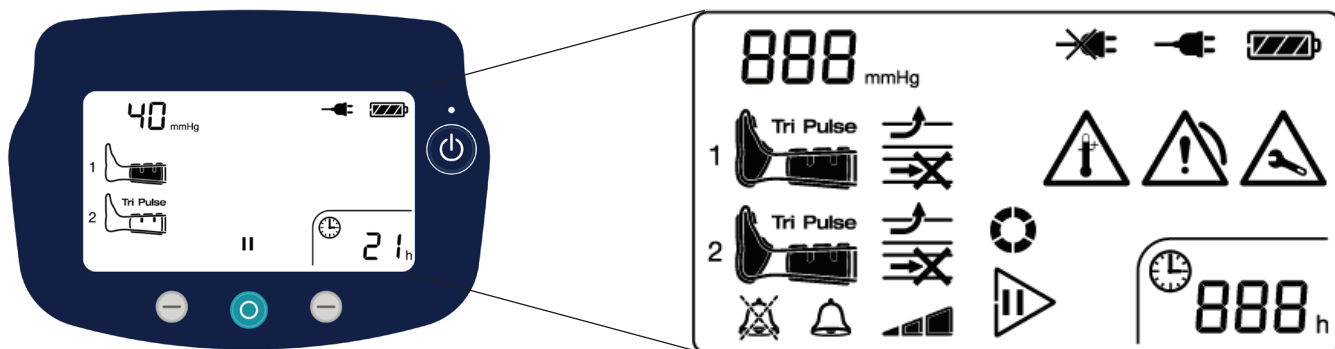

Indikator for netstrøm

Lyser ikke: Netstrømmen er afbrudt.
Lyser grønt: Netstrømmen er tilsluttet.

Tænd/sluk-knap

Sådan tændes enheden: Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder, hvorefter pumpen skifter direkte til standby.

Sådan slukkes enheden: Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder.



Midterste betjeningsknap

Tryk for at starte behandling.
Tryk og hold nede for at stoppe behandling.



Venstre betjeningsknap

Tryk for at stille akustisk alarm på lydløs.
Tryk og hold nede for at indstille alarmlydstyrke.



Højre betjeningsknap

Tryk og hold nede for at skifte til tilstanden Nulstil driftstid for plejemodtager.

888 mmHg

Indikator for manchettryk



Indikatorer for manchettype- og oppumpning

Tilkoblet, ikke pumpet op Tilkoblet, pumpet op



Fod



Ensartet læg (eller læg og lår)



Sekventiel (Tri Pulse) læg (eller læg og lår)

1
2

Numre på slangesætkobling



Indikator for akustisk alarm på lydløs



Indikator for status på akustisk alarm

Under alarm: Indikerer, at alarmen kan stilles på lydløs.



Indikatorer for advarsler og alarmer

Der er registreret en alarm, der kan forårsage en afbrydelse af behandlingen.



Lavt tryk eller manchetlækage.



Knæk på eller blokeret slangesæt.



Høj temperatur.



Der er registreret en hardwarefejl, eller der skal udføres periodisk service.



Indikator for lydstyrke



Indikator for vent – initialiserer



Indikator for start behandling

Vises i tilstanden Standby, når mindst én manchet er tilsluttet.



Indikator for stop behandling

Vises i driftstilstand.



Indikatorer for netstrøm

Pumpe tilkoblet netstrøm.



Pumpe IKKE tilkoblet netstrøm.



Indikatorer for batteri



Batteri afladet



Batteri ¼ fuldt



Batteri ½ fuldt



Batteri ¾ fuldt



Batteri fuldt



888 h Indikator for behandlingstid