


Flowtron ACS900

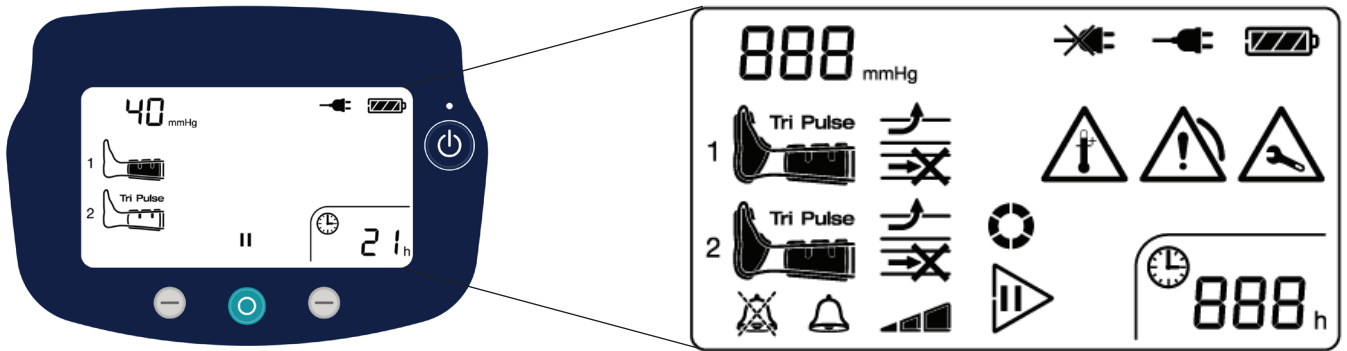

Indicatore di rete

Non illuminato: l'alimentazione di rete è scollegata.
Spia verde accesa: l'alimentazione di rete è collegata.

Pulsante di accensione

Per accendere: tenere premuto per circa 2 secondi, la pompa passa direttamente alla modalità Standby.
Per spegnere: tenere premuto per circa 2 secondi.



Pulsante centrale

Premere per iniziare la terapia.
Tenere premuto per interrompere la terapia.



Pulsante sinistro

Premere per silenziare gli allarmi acustici.
Tenere premuto per le impostazioni di volume degli allarmi.



Pulsante destro

Tenere premuto per inserire la durata del trattamento paziente.

888 mmHg Indicatore della pressione del gambale



Indicatori tipo gambale e gonfiaggio

Collegato e non gonfiato Collegato e gonfiato



Piede



Uniforme per polpaccio (o per polpaccio/coscia)



Sequenziale (Tri Pulse) per polpaccio (o per polpaccio/coscia)

1
2

Indicatori connettore gruppo tubi



Indicatore di allarme acustico silenziato



Indicatore dello stato dell'allarme acustico

Durante l'allarme: indica che l'allarme può essere silenziato.



Avvertenza e indicatori di allarme

Allarme rilevato in grado di causare un'interruzione nella terapia.



Pressione bassa o perdita nel gambale.



Il gruppo tubi è piegato o bloccato.



Temperatura elevata.



Problema hardware rilevato o manutenzione periodica necessaria.



Indicatore volume



Attendere - indicatore di inizializzazione



Indicatore di avvio della terapia

Visualizzato in Standby quando è collegato almeno un gambale.



Indicatore di interruzione della terapia

Visualizzato in modalità di funzionamento.

Indicatori dell'alimentazione di rete



Pompa collegata alla rete elettrica.



Pompa NON collegata alla rete elettrica.



Indicatori batteria



Batteria scarica



Batteria a 1/4 della carica



Batteria a metà carica



Batteria a 3/4 della carica



Batteria completamente carica



888 h Indicatore della durata della terapia