


Flowtron ACS900

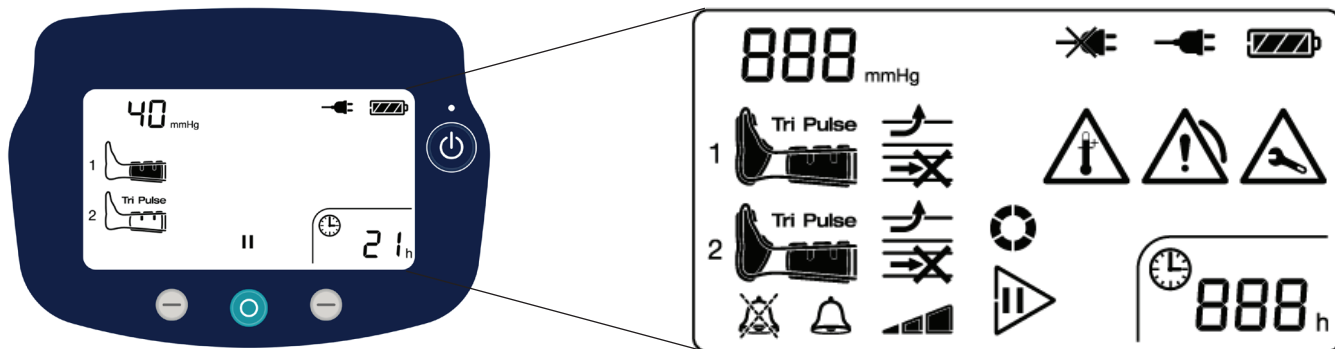

Stroomindicator

Niet verlicht: netstroom is niet aangesloten.
Groen verlicht: netstroom is aangesloten.

Aan/uit-knop

Aanzetten: Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt, waarna de pomp rechtstreeks op Stand-by overgaat.
Uitzetten: Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.



Middelste bedieningsknop

Druk in om de therapie te starten.
Ingedrukt houden om de therapie te stoppen.



Linkerbedieningsknop

Druk in om het akoestisch alarmsignaal te dempen.
Ingedrukt houden voor de volume-instellingen van het alarm.



Rechterbedieningsknop

Ingedrukt houden voor de modus Uren therapie per zorgvrager resetten.

888 mmHg

Manchetdrukindicator



Manchettype- en opblaasindicatoren

Aangesloten, niet opgeblazen Aangesloten, opgeblazen



Voet



Uniforme kuit (of kuit & dij)



Sequentiële (Tri Pulse) kuit (of kuit & dij)

1
2

Connectornummers van slangenset



Indicator van akoestisch alarmsignaal gedempt



Statusindicator van akoestisch alarmsignaal

Tijdens het alarm: geeft aan dat het alarmsignaal kan worden gedempt.



Waarschuwings- en alarmsignalen

Alarm gedetecteerd dat kan leiden tot een onderbreking van de therapie.



Lage druk of lek in de manchet.



Geknikte of geblokkeerde slangenset.



Hoge temperatuur.



Hardwarefout gedetecteerd of periodiek onderhoud nodig.



Volume-indicator



Wacht - initialisatie van indicator



Indicator van therapie starten

Wordt weergegeven in Stand-by indien er ten minste één manchet is aangesloten.



Indicator van therapie stoppen

Getoond in de bedrijfsmodus.

Netvoedingsindicatoren



Pomp aangesloten op de netstroom.



Pomp NIET aangesloten op de netstroom.



Indicatielampjes van batterijspanning



Accu leeg



Accu 1/4 vol



Accu 1/2 vol



Accu 3/4 vol



Accu vol

888 h

Indicatielampje van de therapietijd