


Flowtron ACS900

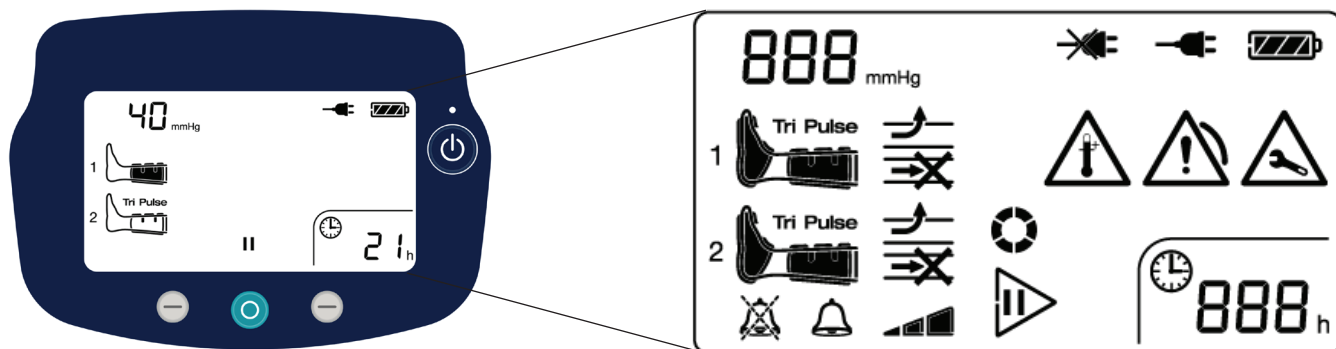

Strømindikator

Slukket: strøm er frakoblet.

Lyser grønt: koblet til strømmettet.

På/av-knapp

Slå på: Trykk og hold inne i ca. 2 sekunder, pumpen går direkte til standby.

Slå av: Trykk og hold inne i to sekunder.



Midtre betjeningsknapp

Trykk for å starte behandlingen.

Hold inne for å stoppe behandlingen.



Venstre betjeningsknapp

Trykk for å dempe en lydalarm.

Hold inne for å endre innstillinger for alarmvolum.



Høyre betjeningsknapp

Hold inne for å åpne modus for tilbakestilling av pasientens driftstimer.

888 mmHg

Indikator for mansjettrykk



Indikatorer for mansjetttype og oppblåsing

Tilkoblet, ikke oppblåst



Tilkoblet og oppblåst



Fot



Ensartet legg (eller legg og lår)



Sekvensiell (Tri Pulse) legg (eller legg og lår)

1
2

Koblingsnummer slangesett



Indikator for dempet lydalarm



Statusindikator for lydalarm

Under en alarm: Indikerer at alarmen kan dempes.



Advarsler og alarmindikatorer

Det er registrert en alarm som kan føre til avbrudd i behandlingen.



Lavt trykk eller mansjettlekkasje.



Knekket eller blokkert slangesett.



Høy temperatur



Maskinvarefeil eller behov for periodisk service.



Volumindikator



Vent – initialiserer indikator



Start behandling-indikator

Vises i standby hvis minst én mansjett er tilkoblet.



Stopp behandling-indikator

Vises i driftsmodus.



Hovedstrømindikator

Pumpen er koblet til strømmettet.



Pumpen er IKKE koblet til strømmettet.



Batteriindikatorer



Tomt batteri



¼ fullt batteri



Halvfullt batteri



¾ fullt batteri



Fullt batteri



888 h Indikatorer for behandlingstid