


Flowtron ACS900

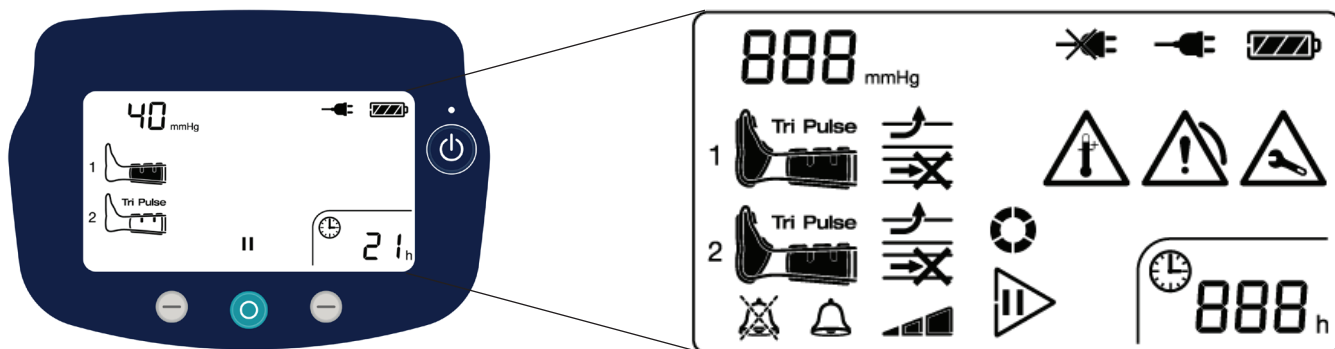

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik wygaszony: zasilanie odłączone.
Wskaźnik świeci się na zielono: zasilanie podłączone.

Przycisk zasilania

Włączenie: naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, pompa przejdzie bezpośrednio do trybu czuwania.

Wyłączenie: naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy.



Środkowy przycisk sterowania

Naciśnij, aby rozpocząć leczenie.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zakończyć leczenie.



Lewy przycisk sterowania

Naciśnij, aby wyciszyć alarm dźwiękowy.
Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć ustawienia głośności alarmu.



Prawy przycisk sterowania

Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć tryb resetowania czasu zastosowania u pacjenta.

888 mmHg

Wskaźnik ciśnienia mankietu



Wskaźniki typu i ciśnienia w mankiecie

Podłączony i nienapompowany Podłączony i napompowany



Stopa



Jednorodne łydki (lub łydka i udo)



Sekwencyjny (Tri Pulse) łydka (lub łydka i udo)

1
2

Numery przyłączy przewodu powietrznego



Wskaźnik wyciszenia alarmu dźwiękowego



Wskaźnik statusu alarmu dźwiękowego

Podczas alarmu: pokazuje, że można wyciszyć alarm.



Wskaźniki ostrzegawcze i alarmy

Wykryto alarm, który może spowodować przerwanie leczenia.



Niskie ciśnienie lub nieszczelność mankietu.



Zagięty lub zablokowany przewód powietrzny.



Wysoka temperatura.



Wykryto usterkę sprzętową lub nadchodzi termin przeglądu okresowego.



Wskaźnik głośności



Czekaj — wskaźnik inicjalizacji



Wskaźnik rozpoczęcia leczenia

Wyświetlany w trybie gotowości, kiedy jest podłączony przynajmniej jeden mankieta.



Wskaźnik zakończenia leczenia

Wyświetlany w trybie pracy.

Wskaźniki zasilania



Pompa jest podłączona do zasilania sieciowego.



Pompa NIE jest podłączona do zasilania sieciowego.



Wskaźniki akumulatora



Akumulator rozładowany



Akumulator naładowany w 1/4



Akumulator naładowany w 1/2



Akumulator naładowany w 3/4



Akumulator całkowicie naładowany

888 h

Wskaźnik czasu terapii