


Flowtron ACS900

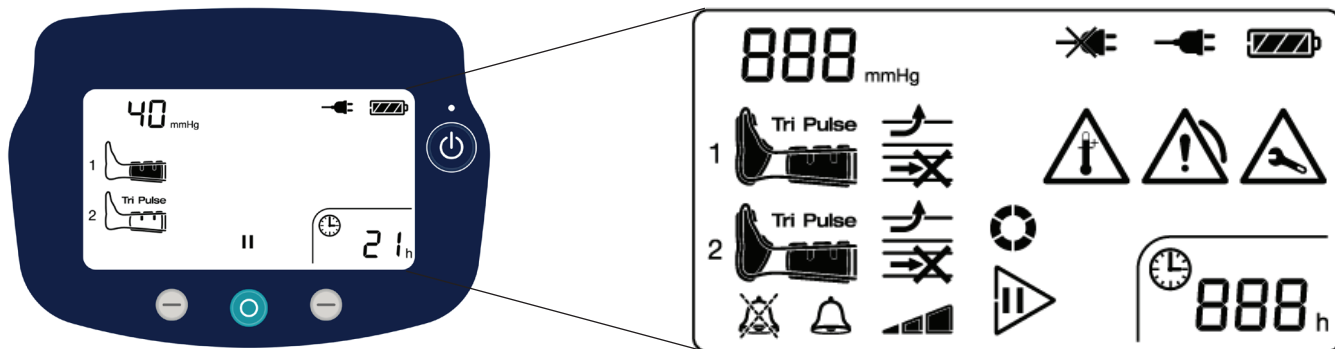

Индикатор питания

Не горит: питание отключено.
Горит зеленым цветом: питание включено.

Кнопка питания

Включение: Нажмите и удерживайте около 2 секунд — насос сразу перейдет в режим ожидания.
Выключение: Нажмите и удерживайте около 2 секунд.



Средняя кнопка управления

Нажмите для запуска сеанса терапии.
Нажмите и удерживайте для остановки сеанса терапии.



Левая кнопка управления

Нажмите, чтобы отключить звуковой сигнал тревоги.
Нажмите и удерживайте для перехода к настройкам громкости сигнала тревоги.



Правая кнопка управления

Нажмите и удерживайте для входа в режим сброса таймера использования пациентом.



Индикатор давления в манжете



Индикатор типа манжеты и индикатор накачивания

Подключена, не накачана Подключена, накачана



Ножная



Равномерная компрессия, голень (или голень и бедро)



Секвенциальная компрессия (Tri Pulse), голень (или голень и бедро)

1
2

Номера разъемов трубок



Индикатор отключения звукового сигнала тревоги



Индикатор состояния звукового сигнала тревоги

При подаче сигнала тревоги: показывает, что звук сигнала тревоги можно отключить.

Индикаторы сигналов тревоги и предупреждений



Обнаружена неисправность, которая может прервать сеанс терапии.



Низкое давление или нарушение герметичности манжеты.



Трубка перекручена или закупорена.



Высокая температура.



Обнаружена неисправность аппаратуры или требуется проведение регулярного технического обслуживания.



Индикатор громкости



Ожидание — инициализация индикатора



Индикатор начала сеанса терапии

Отображается в режиме ожидания, если подключена хотя бы одна манжета.



Индикатор остановки сеанса терапии

Отображается в рабочем режиме.

Индикаторы подключения к электросети



Насос подключен к электрической сети.



Насос НЕ подключен к электрической сети.



Индикаторы заряда аккумулятора



Аккумулятор разряжен



Аккумулятор заряжен на ¼



Аккумулятор заряжен на ½



Аккумулятор заряжен на ¾



Аккумулятор заряжен полностью



Индикатор времени сеанса терапии