


Flowtron ACS900

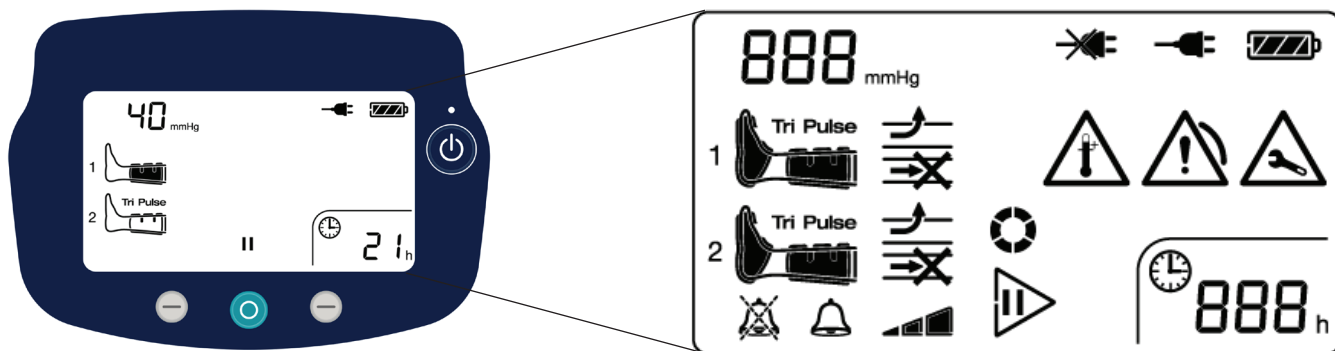

Nätspänningsindikator

Inte tänd: nätspänningen är frånkopplad.

Tänd grön indikator: ansluten till nätspänning.



Strömknapp

För att slå på: Håll intryckt i cirka 2 sekunder.

Pumpen går sedan direkt till Standby-läge.

För att stänga av: Håll intryckt i cirka 2 sekunder.



Start/stopknapp

Tryck för att starta behandlingen.

Håll intryckt för att stoppa behandlingen.



Vänster styrknapp

Tryck för att tysta larmsignalen.

Håll intryckt för larmvolyminställningar.



Höger styrknapp

Håll intryckt för att gå in i läget för nollställning av behandlingstid.

888 mmHg

Indikator för manschettryck



Indikatorer för manschettyp och uppblåsning

Ansluten, ej uppblåst



Ansluten och uppblåst



Fot



Vad, enkammar (eller vad och lår)



Sekvensuppblåst (Tri Pulse) vad (eller vad och lår)

1
2

Nummer på slangsetanslutning



Indikator för tystat ljudlarm



Indikator för ljudlarm

Under larm: Indikerar att larmet kan tystas.

Varningar och larm

Larm som kan orsaka avbrott i behandlingen har upptäckts.



Lågt tryck eller läckage i en manschett.



Vikt eller blockerat slangset.



Hög temperatur.



Hårdvarufel upptäckt eller behov av periodisk service.



Volymindikator



Vänta – initieringsindikator



Indikator för start av behandling

Visas i Standby när minst en manschett är ansluten.



Indikator för avslut av behandling

Visas i körläge.

Nätspänningsindikator



Pump ansluten till nätspänning.



Pump EJ ansluten till nätspänning.



Batteriindikator



Batteriet är urladdat



¼ laddning



½ laddning



¾ laddning



Batteriet är fulladdat



888 h Indikator för behandlingstid