



TLAČÍTKO/ KONTROLKA	FUNKCE
1	Když se rozsvítí žlutá kontrolka: Probíhá program. Na displeji je zobrazena teplota a fáze čištění.
2	Když se rozsvítí zelená kontrolka: Program je dokončen. Po otevření dveří zelená kontrolka zhasne a na displeji je zobrazena maximální teplota procesu.
3	Když se rozsvítí červená kontrolka: Zařízení nedosáhlo dostatečné teploty pro dezinfekci nebo se vyskytla jiná chyba (kód chyby F).
4	Displej.
5	Tlačítko pro spuštění oplachování lemů bez dezinfekce!
6	Tlačítko pro ruční přidání nebo odstranění detergentu během procesu.
7	Otevřít/zavřít dveře.
8	Čidlo sloužící k otevření nebo zavření dveří a ke spuštění vybraného programu.
9	Tlačítko spuštění ekonomického programu pro urinální lahve.
10	Tlačítko spuštění základního programu pro běžně znečištěné předměty.
11	Tlačítko spuštění intenzivního programu pro silně znečištěné předměty.
6+11	Kombinace tlačítek pro výběr programů s detergenty pro silně znečištěné předměty.
6+10	Kombinace tlačítek pro výběr programu s detergenty pro běžné předměty.

	U1/U4	Nízká hladina detergentu.
	U7	Upozornění na vysokou teplotu předmětů.

Pro chybové hlášení typu F viz Návod k použití.