



TASTE/ LEUCHE	FUNKTIONSWEISE
1	Wenn das gelbe Licht aufleuchtet: Im Gerät läuft ein Programm. Auf dem Display werden die Temperatur und die Reinigungsphase angezeigt.
2	Wenn das grüne Licht aufleuchtet: Das Programm ist abgeschlossen. Die grüne Leuchte erlischt, wenn die Tür geöffnet wird, und im Display wird die Höchsttemperatur des Prozesses angezeigt.
3	Wenn das rote Licht aufleuchtet: Das Gerät hat die Desinfektionstemperatur nicht erreicht oder ein anderer Fehler ist aufgetreten (Fehlercode F).
4	Display.
5	Starttaste für Randspülung ohne Desinfektion!
6	Taste für manuelles Hinzufügen oder Entfernen von Prozessmittel in einem Prozess.
7	Tür öffnen/schließen.
8	Sensor zum Öffnen/Schließen der Tür und zum Starten des vorausgewählten Programms.
9	Starttaste des Sparprogramms für Urinflaschen.
10	Starttaste des Normalprogramms für normal verunreinigte Behälter.
11	Starttaste des Intensivprogramms für stark verunreinigte Behälter.
6+11	Tastenkombination zur Auswahl von Programmen mit Reinigungsmitteln für stark verunreinigte Behälter.
6+10	Tastenkombination zur Auswahl des Programms mit Reinigungsmitteln für häufig verwendete Behälter.

	U1/U4	Niedriger Füllstand Reinigungsmittel.
	U7	Warnung vor hoher Temperatur der Gegenstände.

Für Fehlermeldung vom Typ F, siehe Bedienungsanleitung.