



BOTÓN / LUZ	FUNCIONAMIENTO
1	Si se enciende la luz amarilla: la máquina está ejecutando un programa. Las fases de temperatura y de limpieza pueden verse en la pantalla.
2	Si se enciende la luz verde: el programa se completó. La luz verde se apagará cuando la puerta se abra, y la temperatura máxima del proceso aparecerá en la pantalla.
3	Si se enciende la luz roja: la máquina no ha alcanzado la temperatura de desinfección o se ha producido otro error (código de error F).
4	Pantalla.
5	¡Botón para iniciar el vaciado sin desinfección!
6	Botón para añadir o eliminar manualmente agente procesador en un proceso.
7	Abrir/cerrar puerta.
8	Sensor para abrir/cerrar la puerta e iniciar el programa preseleccionado.
9	Botón para iniciar el programa económico para orinales.
10	Botón para iniciar el programa normal para elementos con suciedad normal.
11	Botón para iniciar el programa intensivo para elementos con mucha suciedad.
6+11	Combinación de botones para seleccionar programas con limpiadores para elementos con mucha suciedad.
6+10	Combinación de botones que permite seleccionar programas con limpiadores para elementos de circulación.

	U1/U4	Nivel bajo de agente.
	U7	Advertencia de temperatura alta de los elementos.

Para el mensaje de error de tipo F, consulte las Instrucciones de uso.