



BOUTON/ TÉMOIN	FONCTION
1	Lorsque le témoin jaune s'allume : Un programme est en cours d'exécution. La température et la phase de nettoyage s'affichent.
2	Lorsque le témoin vert s'allume : Le programme est terminé. Le témoin vert s'éteint lorsque la porte est ouverte et la température maximale du procédé est affichée.
3	Lorsque le témoin rouge s'allume : l'appareil n'a pas atteint la température de désinfection ou une autre erreur s'est produite (code d'erreur F).
4	Écran.
5	Bouton permettant de démarrer le rinçage annulaire sans désinfection.
6	Bouton permettant d'ajouter ou de supprimer manuellement du produit de procédé lors d'un procédé.
7	Ouvrir/fermer la porte.
8	Capteur pour ouvrir/fermer la porte et pour démarrer le programme présélectionné.
9	Bouton permettant de démarrer le programme économique pour les urinaux.
10	Bouton permettant de démarrer le programme normal pour les objets normalement sales.
11	Bouton permettant de démarrer le programme intensif pour les objets très sales.
6+11	Combinaison de boutons permettant de sélectionner des programmes avec des produits de nettoyage pour les objets fortement souillés.
6+10	Combinaison de boutons pour la sélection de programmes avec des produits de nettoyage pour les objets circulants généraux.

	U1/U4	Niveau faible de produit.
	U7	Avertissement : température élevée des objets.

Pour les messages d'erreur de type F, reportez-vous au mode d'emploi.