



| PULSANTE/ SPIA | FUNZIONAMENTO  |
|----------------|--|
| 1              | All'accensione della spia gialla: è in corso un programma. Il display mostra la fase di pulizia attuale e la temperatura.  |
| 2              | All'accensione della spia verde: il programma è stato completato. La spia verde si spegne quando viene aperto il portellone e sul display appare la temperatura massima del ciclo. |
| 3              | All'accensione della spia rossa: la macchina non ha raggiunto la temperatura di disinfezione o si è verificato un altro errore (codice di errore F).                               |
| 4              | Display.   |
| 5              | Pulsante per l'avvio del risciacquo. Senza disinfezione!   |
| 6              | Pulsante per l'aggiunta o la rimozione manuale del detergente durante un ciclo.  |
| 7              | Apertura/chiusura portellone.  |
| 8              | Sensore per l'apertura/chiusura del portellone e per l'avvio del programma preselezionato.   |
| 9              | Pulsante per la selezione del programma economico per presidi come i pappagalli.   |
| 10             | Pulsante per la selezione del programma normale per presidi normalmente sporchi.   |
| 11             | Pulsante per la selezione del programma intensivo per presidi molto sporchi.   |
| 6+11           | Combinazione di pulsanti per la selezione di programmi con detergenti per presidi molto sporchi.   |
| 6+10           | Combinazione di pulsanti per la selezione del programma con detergenti per presidi generici.   |

|   |       |                                       |
|---|-------|---------------------------------------|
|  | U1/U4 | Detergente in esaurimento.            |
|  | U7    | Allarme alta temperatura dei presidi. |

Per messaggi di errore di tipo F, consultare le istruzioni d'uso.