


KNAPP/LAMPE	FUNKSJON
1	Når den gule lampen tennes: Maskinen kjører et program. Temperaturen og rengjøringsfasen vises på skjermen.
2	Når den grønne lampen tennes: Programmet er ferdig. Den grønne lampen slukkes når døren åpnes, og prosessens maksimumstemperatur vises på skjermen.
3	Når den røde lampen tennes: Maskinen har ikke nådd desinfeksjonstemperatur, eller en annen feil har oppstått (feilkode F).
4	Display.
5	Knapp for å starte kantspyling uten desinfeksjon!
6	Knapp for å legge til eller fjerne prosessmiddel manuelt i en prosess.
7	Åpne/lukk døren.
8	Føler for å åpne/lukke døren og starte forhåndsvalgt program
9	Knapp for å starte økonomiprogrammet for urinflasker.
10	Knapp for å starte normalt program for normalt tilsmusset gods.
11	Knapp for å starte intensivt program for svært tilsmusset gods.
6+11	Knappekombinasjonen for valg av programmer med vaskemidler for svært tilsmusset utstyr.
6+10	Knappekombinasjon for valg av program med vaskemidler for generelt sirkulasjonsutstyr.

	U1/U4	Middel, lavt nivå.
	U7	Advarsel om høy godstemperatur.

Se type F-feilmeldinger i brugsveiledningen.