



BOTÃO/ LÂMPADA	FUNCIONALIDADE
1	Quando a luz amarela se acende: a máquina está a executar um programa. O visor apresenta a temperatura e a fase de limpeza.
2	Quando a luz verde se acende: o programa está concluído. A lâmpada verde apaga-se quando a porta é aberta; o visor apresenta a temperatura máxima do processo.
3	Quando a luz vermelha se acende: a máquina não atingiu a temperatura de desinfeção ou ocorreu outro erro (código de erro F).
4	Ecrã.
5	Botão para iniciar a lavagem do rebordo sem desinfeção!
6	Botão para adicionar ou remover o agente de processo manualmente num processo.
7	Abrir/fechar a porta.
8	Sensor para abrir/fechar a porta e iniciar o programa pré-selecionado.
9	Botão para iniciar o programa económico para urinóis.
10	Botão para iniciar o programa normal para itens normalmente sujos.
11	Botão para iniciar o programa intensivo para itens muito sujos.
6+11	A combinação de botões para seleccionar programas com agentes de limpeza para itens muito sujos.
6+10	A combinação de botões para seleccionar o programa com agentes de limpeza para itens de circulação geral.

	U1/U4	Nível baixo de agente.
	U7	Aviso de temperatura elevada para os itens.

Para mensagens de erro F, consulte as Instruções de Utilização.