



КНОПКА/ ЛАМПОЧКА	ФУНКЦИЯ
1	Когда загорается желтый световой сигнал: машина выполняет одну из программ. На дисплее можно видеть рабочую температуру и фазу очистки.
2	Когда загорается зеленый световой сигнал: программа завершена. Когда дверца открыта, зеленая лампочка гаснет, и на дисплее высвечивается максимальная температура процесса.
3	Когда загорается красный световой сигнал: машина не достигла температуры дезинфекции или возникла другая ошибка (код ошибки F).
4	Дисплей.
5	Кнопка для запуска промывки по периметру. Без дезинфекции!
6	Кнопка для ручного добавления или удаления рабочего средства в процессе эксплуатации.
7	Открыть/закрыть дверцу.
8	Датчик для открывания/закрывания дверцы и для запуска предварительно выбранной программы.
9	Клавиша для выбора программы минимальной обработки для мочеприемников.
10	Клавиша для выбора стандартной программы обработки для предметов со средней степенью загрязнения.
11	Клавиша для выбора программы интенсивной обработки для сильно загрязненных предметов.
6+11	Комбинация кнопок для выбора программ с применением чистящих средств для сильно загрязненных предметов.
6+10	Комбинация кнопок для выбора программы с применением чистящих средств для предметов общего пользования.

	U1/U4	Низкий уровень средства.
	U7	Предостережение о высокой температуре обрабатываемых предметов.

Информацию об ошибках с кодом F см. в «Инструкциях по применению».