



KNAPP / LAMPA	FUNKTION
1	När gul lampa lyser: Maskinen är upptagen med att köra ett program. I teckenfönstret visas temperatur och rengöringsfas.
2	När grön lampa lyser: Programmet är klart. Den gröna lampan släcks när dörren öppnas och processens maxtemperatur visas i teckenfönstret.
3	När röd lampa lyser: Maskinen har inte uppnått desinfektionstemperatur eller har annat fel uppstått (Felkod F).
4	Teckenfönster.
5	Knapp för att starta randspolning Utan desinfektion!
6	Knapp för att manuellt tillsätta eller ta bort processmedel i en process.
7	Öppna/stänga luckan.
8	Sensor för öppning/stängning av lucka samt start av förvalt program.
9	Knapp för att starta ekonomiprogram för urinflaskor.
10	Knapp för att starta normalprogrammet för normalt nedsmutsat gods.
11	Knapp för att starta intensivprogram för starkt nedsmutsat gods.
6+11	Knappkombination för att välja program med rengöringsmedel för starkt nedsmutsat gods.
6+10	Knappkombination för att välja program med rengöringsmedel för allmänt cirkulationsgods.

	U1/U4	Låg medelnivå.
	U7	Varning för hög godstemperatur.

För felmeddelanden av typ F, se Instruktioner för användning.