Ninjo





Il nome del modello e il numero di serie devono essere sempre citati al momento dell'ordine di pezzi di ricambio o della richiesta di informazioni tramite telefono o corrispondenza scritta:

Numero di serie della macchina:				
Modello della macchina:				

ATTENZIONE

Per evitare lesioni, leggere sempre le presenti *istruzioni per l'uso* e i documenti a corredo prima di utilizzare il prodotto.



È obbligatorio leggere le istruzioni per l'uso.

Politica di progettazione e copyright

® e ™ sono marchi di proprietà del gruppo di società Arjo.

© Arjo 2023.

La politica dell'azienda è volta al miglioramento costante, per tale ragione questa si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, né completamente né in parte, senza il consenso di Arjo..

Contenuto

IN	TROD	DUZIONE	5		
	Definizioni utilizzate nelle presenti IFU6				
1	PRECAUZIONI DI SICUREZZA7				
1.1 Importante					
	1.2	Interruttore di isolamento	8		
	1.3	In caso di emergenza	8		
2	PRE	SENTAZIONE	9		
	2.1	Campo di applicazione	9		
	2.2	Modelli	9		
	2.3	Pannello di controllo	10		
		2.3.1 Componenti	10		
		2.3.2 Funzioni	10		
	2.4	Opzioni display	11		
		2.4.1 Display durante il programma	11		
		2.4.2 Display dopo la fine del programma			
3	ISTR	UZIONI PER L'USO	12		
	3.1	Panoramica dei programmi	12		
	3.2	Esecuzione di un programma	13		
		3.2.1 Avvio di un programma	13		
		3.2.2 Durante un programma in corso	13		
		3.2.3 Una volta terminato il programma	13		
	3.3	Raffreddamento	14		
	3.4	Esempi dei presidi e selezione dei programmi			
4	MAN	UTENZIONE	15		
	4.1	Camera di lavaggio	15		
	4.2	Rivestimento esterno			
	4.3	Manutenzione preventiva	15		
		4.3.1 Manutenzione periodica	15		
		4.3.2 Tabella per la manutenzione	16		
	4.4	Macchine non in uso	18		
5	ALLA	ARME			
	5.1	Indicazione di allarme			
	5.2	Conferma di un messaggio di errore			
	5.3	Durante l'interruzione di corrente			
6	RISC	DLUZIONE DEI PROBLEMI	20		
	6.1	Elenco dei codici	20		
	6.2	Tipi di codici			
7	DETI	ERGENTE			
	7.1	Utilizzo del detergente	21		
	7.2	Detergente di pulizia			
	7.3	Posizionamento	21		
	7.4	Cambio	22		

8	QUA	LITÀ DELL'ACQUA	23
	8.1	Requisiti	23
	8.2	Fattori determinanti	23
	8.3	Raccomandazione	23
	8.4	Standard locale	23
	8.5	Standard locale, specifiche tipiche	24
9	DICH	HARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO	25
	9.1	Commenti	25
	9.2	Distribuzione	25
	9.3	Utilizzo	25
	9.4		
	9.5	Pallet di caricamento	26
10	SM	ALTIMENTO A FINE VITA	27
11	DES	SCRIZIONE DEI SIMBOLI	28
12	CO	MPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA	30

INTRODUZIONE

Le Istruzioni per l'uso (IFU) descrivono il design e il funzionamento della macchina nonché la manutenzione e cura da parte dell'utilizzatore. Le istruzioni di montaggio e installazione descrivono l'installazione della macchina. Il manuale tecnico descrive le informazioni necessarie per operatori e personale di manutenzione. È necessario attenersi alle informazioni del manuale per assicurare un funzionamento corretto e sicuro.

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, gli utilizzatori devono leggere attentamente le presenti Istruzioni per l'uso e familiarizzare con il funzionamento della macchina e le relative istruzioni di sicurezza. Gli operatori e gli addetti alla manutenzione devono aver completato la formazione organizzata dal reparto marketing Arjo.

Le informazioni contenute nelle presenti Istruzioni per l'uso descrivono la macchina come fornita da parte di Arjo. e possono divergere in base alla personalizzazione della macchina oppure in determinati Paesi.

Modelli disponibili:

FD1600	Modello a pavimento con camera in polimero
FD1610	Modello a pavimento con camera in acciaio inossidabile
FD1615	Modello sottotavolo con camera in acciaio inossidabile

La macchina è accompagnata dalla seguente documentazione:

- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni di montaggio e installazione
- Guida rapida

I seguenti documenti sono forniti dal venditore su richiesta dell'utilizzatore finale:

- · Manuale tecnico
- Elenco delle parti di ricambio

La Guida rapida allegata deve essere appesa in un punto chiaramente visibile dell'area di installazione.

Arjo si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e al design senza preavviso. Le informazioni contenute nelle presenti Istruzioni per l'uso sono aggiornate alla data di pubblicazione.

Definizioni utilizzate nelle presenti IFU



Avvertenza di sicurezza. La non ottemperanza a queste avvertenze può provocare lesioni o danni alla macchina.



Superficie calda. Rischio di lesioni.



Tensione pericolosa. Rischio di lesioni.

Nota!

Nota: informazione importante per il corretto utilizzo del sistema o del dispositivo.

1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

La macchina è stata progettata con numerosi dispositivi di sicurezza incorporati.

Per prevenire lesioni, è molto importante non bypassare questi dispositivi di sicurezza.

1.1 Importante

- La macchina è progettata per essere collegata solamente all'acqua (e per il vapore, se applicabile).
- Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.
- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato. Inoltre, il personale deve frequentare corsi di aggiornamento periodici.
- In caso di parti mancanti o danneggiate, NON utilizzare il prodotto.
- Esercitare cautela durante l'uso della macchina, in quanto utilizza acqua calda e, in alcuni casi, vapore.
- Esercitare cautela relativamente agli agenti chimici utilizzati nella macchina. Attenersi alle istruzioni relative all'agente:
 - se l'agente viene ingerito, entra in contatto con gli occhi o con la pelle, oppure se vengono inalati vapori;
 - o per istruzioni sul dosaggio e le temperature di lavaggio;
 - per istruzioni relative allo stoccaggio e alla separazione/ smaltimento degli imballaggi.
- Accertarsi che la macchina abbia accesso al detergente prima dell'avvio del processo. Questa indicazione è importante sia per il funzionamento della macchina sia per prevenire decolorazioni della camera di lavaggio.
- Per funzionare correttamente, la macchina deve essere pulita regolarmente.
- · La macchina non deve essere lavata con acqua.
- L'installazione e l'assistenza devono essere effettuate esclusivamente da personale addestrato.
- Non bypassare mai l'interruttore della porta della macchina, in alcuna circostanza.
- Collegare sempre l'attrezzatura per mezzo di un dispositivo a corrente residua (RCD).
- Utilizzare sempre una presa di alimentazione con messa a terra per il disinfettore-lavapadelle.
- Le perdite nel sistema, ad es. di una guarnizione del portellone usurata, devono essere riparate immediatamente.
- I ricambi devono essere ordinati esclusivamente presso i rivenditori Arjo.
- In caso di incidente grave in relazione al presente dispositivo medico a danno dell'utilizzatore o del paziente, questi devono segnalare la circostanza al produttore o al distributore del dispositivo medico. All'interno dell'Unione europea, l'utilizzatore deve segnalare l'incidente grave anche all'autorità competente dello Stato membro in cui opera.

1.2 Interruttore di isolamento

La macchina deve sempre essere dotata di un interruttore di isolamento dall'alimentazione elettrica. L'interruttore di isolamento deve essere facilmente accessibile su un muro in prossimità della macchina. L'interruttore di isolamento elettrico esterno deve essere contrassegnato con "I" e "O" per consentire di determinare la sua posizione.

1.3 In caso di emergenza

- · Disinserire l'interruttore generale.
- Chiudere le valvole di intercettazione delle condutture di alimentazione dell'acqua e del vapore.

2 PRESENTAZIONE

2.1 Campo di applicazione

Disinfettore-lavapadelle per lo svuotamento, padelle per la pulizia e la disinfezione, pappagalli e altri presidi medici per rifiuti biologici umani.

Per soddisfare i requisiti della norma EN ISO 15883, i presidi devono essere collocati nei supporti appropriati, raccomandati da Arjo.

Il cliente è responsabile della corretta installazione e messa in esercizio e del corretto collaudo ai sensi della norma UNI EN ISO 15883 prima dell'uso del prodotto.

2.2 Modelli

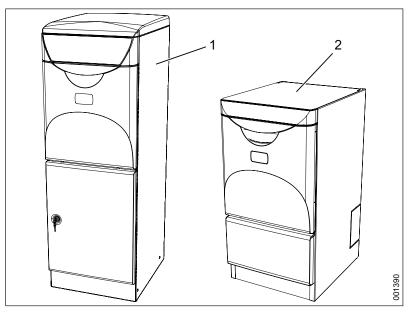



Figura 1. Modelli macchina

1. Modello a pavimento

2. Modello sotto tavolo

2.3 Pannello di controllo

2.3.1 Componenti

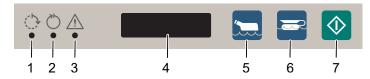

7.

Figura 2. Pannello di controllo

- 1. Giallo: Processo in corso 5. Prog
- 2. Verde: Processo completato 6.
- 3. Rosso: indicazione di errore
- 4. Display

Programma economico

Programma normale

Avviamento di un programma

2.3.2 Funzioni

	Funzionamento
O	Spia gialla lampeggiante: il ciclo può essere interrotto. Spia gialla: è in corso un programma. Il display indica lo stato corrente*, ad es. la fase e la temperatura di pulizia.
Ð	Spia verde: il programma è stato completato. La spia verde si spegne quando viene aperto il portellone e per un periodo limitato compare una sintesi del programma sul display*, ad es. la temperatura massima.
\triangle	Spia rossa: indicazione di errore. Il display mostra un messaggio di errore.
	Pulsante per la scelta del programma economico per presidi poco sporchi.
li)	Pulsante per selezionare il programma normale per presidi sporchi.
\Diamond	Pulsante per avviare un programma.

^{*} Le informazioni visualizzate dipendono dalle opzioni del display.

2.4 Opzioni display

Un tecnico di assistenza può impostare le informazioni che saranno visualizzate sul display.

2.4.1 Display durante il programma

Il display può essere impostato per visualizzare una delle seguenti alternative durante l'esecuzione di un programma.

- Temperatura
- Valore A₀
- Valore A_n, temperatura
- · Tempo residuo
- Temperatura, tempo residuo
- Valore A_n, tempo residuo
- Valore A₀, tempo residuo, temperatura

Se è selezionata un'alternativa con più parametri, i parametri si alternano sul display. Il valore $A_{\scriptscriptstyle 0}$ resta sempre 0 finché non inizia la disinfezione termica. Quando la temperatura raggiunge 85 °C, il valore A0 aumenta in linea con la temperatura e il tempo.

2.4.2 Display dopo la fine del programma

Il display può essere impostato per visualizzare una delle seguenti alternative al termine di un programma.

- Temperatura massima
- Valore A_n
- Valore A_n, temperatura massima

Se è selezionata un'alternativa con più parametri, i parametri si alternano sul display.

3 ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZA:



Per evitare la contaminazione, quando si maneggiano contenitori di rifiuti sporchi e si caricano i presidi nel disinfettore-lavapadelle, utilizzare dispositivi di protezione individuale, come guanti e occhiali protettivi.

3.1 Panoramica dei programmi

Qui sono descritti i programmi standard della macchina. Possono essere presenti altri programmi per i pulsanti programma. Le funzioni dei pulsanti possono essere modificate da un tecnico dell'assistenza.

Programma	Economico	Normale	
Articoli	Sporcizia leggera	Sporcizia normale	
Chiave	5		
Ciclo	Pulizia Disinfezione Ventilazione (opzionale) Fine del programma	Pulizia Disinfezione Ventilazione (opzionale) Fine del programma	
Durata*	6–10 min	7–11 min	
Consumo energetico	0,16 kWh	0,16 kWh	
Consumo d'acqua**	11 + - 10%	18 I +- 10%	

^{*} La durata del ciclo può variare a seconda del metodo di raffreddamento/ventilazione utilizzato. e a seconda della temperatura e della pressione dell'acqua.

^{**} Incluso il raffreddamento.

3.2 Esecuzione di un programma

3.2.1 Avvio di un programma

AVVERTENZA:



Se la macchina non è stata utilizzata per oltre 72 ore, è necessario eseguire un programma a camera vuota prima di usare la macchina per pulire articoli.

- 1. Aprire il portellone.
- 2. Collocare i presidi da pulire nel cestello.
- 3. Chiudere il portello.
- 4. Selezionare il programma:
 - Programma normale: premere , quindi .
 - Programma economico: premere 🔙, quindi 💠.
- 5. La spia gialla su ⊜ lampeggia per sei secondi. Nel frattempo, il programma può essere annullato premendo ◆.

3.2.2 Durante un programma in corso



AVVERTENZA:

Se la spia rossa si accende si è verificato un errore. Il ciclo viene annullato e deve essere ripetuto.

3.2.3 Una volta terminato il programma

AVVERTENZA:

Al termine del programma, i presidi possono essere ancora caldi. Se la temperatura dei presidi è superiore a 60 °C, sul display appare U7.

- 1. Al termine del programma
 - La spia verde su Ö si accende.
 - Il portellone si sblocca automaticamente.
 - Il raffreddamento o la ventilazione degli articoli può continuare dopo il termine del programma (opzionale) e si arresta quando viene aperto il portellone.
- 2. Aprire il portellone e rimuovere gli articoli.

3.3 Raffreddamento

Quando la disinfezione è terminata, si avvia un ventilatore:

- · L'aria calda viene aspirata dalla camera.
- · Viene introdotta aria esterna dal filtro HEPA.

Gli articoli da lavare sono raffreddati utilizzando il metodo seguente:

- Raffreddamento interno: gli articoli da lavare vengono raffreddati mediante l'acqua di un serbatoio.
- Ventilatore (opzionale): gli articoli vengono raffreddati da aria fredda mediante un ventilatore esterno. L'aria viene introdotta attraverso un filtro HEPA.

Il raffreddamento o la ventilazione possono continuare dopo il termine del ciclo (opzionale). Quando la spia verde è accesa il raffreddamento o la ventilazione possono essere arrestati aprendo il portellone.

3.4 Esempi dei presidi e selezione dei programmi

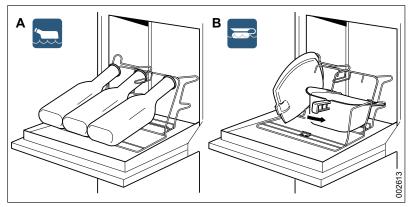


Figura 3. Esempio articoli per programma economico (A) e normale (B)

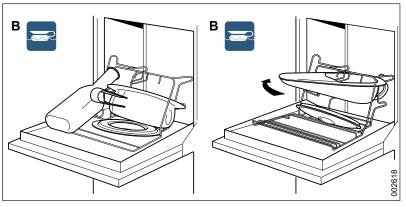


Figura 4. Esempio articoli per programma normale (B)

4 MANUTENZIONE

4.1 Camera di lavaggio

Gli eventuali depositi di calcare possono essere rimossi con un anticalcare atto allo scopo, come il Clean Neutralizer Plus di Arjo. Leggere le istruzioni dell'anticalcare prima dell'utilizzo.

4.2 Rivestimento esterno



AVVERTENZA:

Non lavare la macchina con acqua.

L'esterno della macchina può essere pulito e disinfettato con un detergente a base di alcool o a base acida. È necessario pulire l'area intorno al display con un detergente a base di alcool.

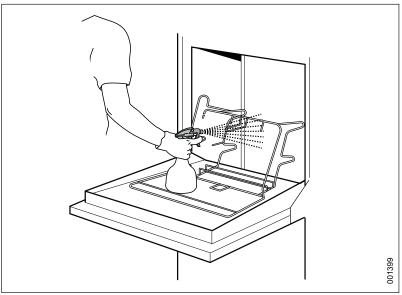


Figura 5. Pulizia della macchina

4.3 Manutenzione preventiva

Per motivi di sicurezza, non modificare le attrezzature o utilizzare parti incompatibili.

4.3.1 Manutenzione periodica

Occorre effettuare la manutenzione periodica e i test di sistema per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della macchina.

L'entità della manutenzione necessaria dipende soprattutto dalla qualità dell'acqua in entrata e dalla frequenza d'uso della macchina. L'intervallo di manutenzione deve essere determinato caso per caso. Arjo raccomanda di eseguire gli interventi di manutenzione stabiliti alle scadenze riportate sulla tabella per la manutenzione.

4.3.2 Tabella per la manutenzione



AVVERTENZA:

La manutenzione può essere eseguita solo da tecnici di assistenza autorizzati.



AVVERTENZA:

La macchina è collegata all'alimentazione elettrica e alcuni componenti sono sotto tensione.

Nota

La tabella per la manutenzione viene mostrata solo a scopo informativo.

La tabella per la manutenzione che segue presenta gli intervalli di manutenzione raccomandati.

In aggiunta al test di sistema, si consiglia di effettuare test di pulizia e validazione delle temperature appropriati, in conformità alla norma EN ISO 15883.

	Misura risolutiva	Ogni anno/ 7.500 cicli	Ogni due anni/ 15.000 cicli	Durata* (minuti)	
1	Generalità				
1.1	Verificare il cablaggio e i punti di connessione.	•		10	
1.2	Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento. Pulire come richiesto.	•		5	
1.3	Verificare che l'etichetta sul pannello sia affissa saldamente, non sia danneggiata e sia leggibile.	•		2	
1.4	Verificare che serratura della porta e interruttore di sicurezza funzionino correttamente.	•		5	
1.5	Verificare che sia stato affisso un cartello con indicazioni sul posizionamento dei presidi e una guida rapida.		1		
1.6	Verificare i codici di errore e il numero di processi.			2	
2	Camera				
2.1	Accertarsi che gli ugelli rotanti si muovano liberamente. Pulire come richiesto.	•		20	
2.2	Verificare che gli ugelli fissi non siano ostruiti da sporcizia e depositi. Pulire come richiesto.	•		20	
2.3	Verificare la presenza di perdite nei raccordi dell'ugello e nei collegamenti del tubo flessibile verso la camera.	•		-	
2.4	Verificare il corretto funzionamento del sensore della temperatura.	•		10	
2.5	Verificare la tenuta delle guarnizioni del portellone e della camera. Pulire o sostituire se necessario.	•		10	
2.6	Verificare il montaggio del carrello per gli articoli.	•		2	
2.7	Verificare la tenuta del collegamento di drenaggio troppo pieno alla camera.		•	-	

	Misura risolutiva		Ogni due anni/ 15.000 cicli	Durata* (minuti)	
2.8	Pulire l'interno della camera di lavaggio.	•		10	
2.9	Verificare il portellone e la molla del portellone.				
3	Serbatoio di ciclo				
3.1	Pulire come richiesto.				
3.2	Verificare e pulire il sensore di livello.	•		5	
3.3	Verificare il funzionamento delle valvole e la tenuta dei collegamenti. Pulire come richiesto.	•		10	
4	Generatori di vapore				
4.1	Verificare eventuali perdite nei collegamenti al generatore di vapore e accertarsi che l'isolamento circostante sia intatto e non vi siano superfici calde esposte.	•		5	
4.2	Verificare il corretto funzionamento del generatore di vapore.	•		10	
5	Pompa principale				
5.1	Verificare che la pompa principale sia fissata saldamente e che non siano presenti perdite nei collegamenti.	•		5	
6	Sistema di dosaggio				
6.1	Verificare i tubi flessibili tra la pompa di dosaggio e il supporto per il detergente. Nel caso sostituirli.		5-10		
6.2	Controllare la quantità di dosaggio. Regolare se necessario.		10-30		
6.3	Sostituire il tubo flessibile nella pompa di dosaggio.		5		
6.4	Verificare il corretto funzionamento dell'allarme per contenitore vuoto. Pulire o sostituire se necessario.		5		
6.5	Verificare il funzionamento della valvola di ritegno nel generatore di vapore.		5		
7	Raccordo di drenaggio				
7.1	Verificare che il raccordo di scarico sia saldamente collegato e non vi siano perdite.	•		5	
8	Ventilatore (opzionale)				
8.1	Sostituire il filtro HEPA.	•		10	
8.2	Verificare che la ventola funzioni correttamente e i raccordi siano a tenuta.	•		5	
8.3	Verificare che le valvole di ritegno funzionino • correttamente. Pulire come richiesto.		10		
8.4	Controllare i tubi flessibili diretti alla ventola.			5	
10	Verifica funzionale (a ciascun intervento)				
10.1	1 Eseguire un ciclo completo e accertarsi che non si presentino anomalie in base ai punti di controllo periodici.				
10.2	.2 Verificare che le spie e gli allarmi del pannello funzionino correttamente.				

^{*} Il tempo necessario è stimato a copertura rimossa e può variare in funzione delle impostazioni di installazione, delle condizioni operative e della strumentazione disponibile per la manutenzione dell'apparecchiatura.

4.4 Macchine non in uso

Le macchine non in uso devono essere svuotate. Rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

5 ALLARME

5.1 Indicazione di allarme



AVVERTENZA:

Nel caso in cui il ciclo di disinfezione sia stato annullato, i presidi non sono puliti. È necessario eseguire nuovamente il ciclo.

Se si accende la spia rossa su ⚠ la disinfezione è stata interrotta. Il display mostra un messaggio di errore, vedere "Risoluzione dei problemi".

5.2 Conferma di un messaggio di errore



AVVERTENZA:

Operazione da svolgersi esclusivamente a cura di personale autorizzato.

Alcuni messaggi di errore devono essere confermati per poter riavviare la macchina. Una volta identificata ed eliminata la causa che ha provocato l'errore, confermare il messaggio di errore come segue:

Per prima cosa premere il pulsante , quindi il pulsante .

Tenere premuti entrambi i pulsanti per 5 secondi. Se l'errore non è stato corretto, non è possibile confermare il messaggio di errore. La macchina è pronta all'uso. Eseguire nuovamente il programma interrotto per disinfettare gli articoli. Se l'errore persiste, contattare il personale di assistenza.

5.3 Durante l'interruzione di corrente

In caso di interruzione di corrente durante un ciclo, la macchina rimane bloccata. Al ripristino della corrente, la macchina ripete automaticamente dall'inizio il ciclo interrotto.

6 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

6.1 Elenco dei codici

Le tabelle seguenti descrivono i messaggi di errore che possono essere generati e le possibili misure risolutive.

Codice	Descrizione	Misura risolutiva
U1	Anticalcare in esaurimento	Riempire il contenitore dell'anticalcare.
U2	Mezzo di processo in esaurimento	Riempire il contenitore del mezzo di processo.
U3	Ausilio di risciacquo in esaurimento	Riempire il contenitore dell'ausilio di risciacquo.
U7	Avvertenza per articoli a temperatura elevata	Lasciare raffreddare i presidi.
U9	Allarme di inattività	La macchina è stata inattiva per 72 ore. Eseguire un ciclo di lavaggio a camera vuota prima di utilizzare la macchina per la pulizia dei presidi.
H6	Tentativo di avvio con portellone aperto	Chiudere il portellone (la macchina esegue un nuovo tentativo di avvio). Se l'errore persiste, rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
H7	Impossibile bloccare il portellone	Confermare il codice di errore come descritto in precedenza. Chiudere il portellone correttamente. Provare ad avviare di nuovo. Se l'errore persiste, rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
H8	Impossibile sbloccare il portellone	Confermare l'errore come descritto nella pagina precedente. Se l'errore persiste, rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
F1	Errore del sensore di temperatura	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
F4	Errore logico nel portellone, portellone bloccato ma non chiuso.	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
F7	Temperatura di disinfezione non raggiunta.	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
F8	Portellone aperto/sbloccato durante il ciclo	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
F9	Errore di impostazioni (errore E2)	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
F10	Impossibile riempire/svuotare serbatoio	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
F11	Perdita	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
F13	Errore programma	Rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.

6.2 Tipi di codici

- Ux è un codice di informazione.
- Hx è un codice di gestione.
- Fx è un codice di errore.

7 DETERGENTE

7.1 Utilizzo del detergente



AVVERTENZA:

L'uso di altri detergenti, in particolare acidi, può danneggiare la macchina (pompe di dosaggio, generatori di vapore e tubi).



AVVERTENZA:

Attenersi alle istruzioni sul flacone per ulteriori indicazioni sull'utilizzo del detergente.

La macchina è stata testata utilizzando detergenti Arjo. Raccomandiamo l'utilizzo di detergenti Arjo.

- L'uso di prodotti chimici raccomandati nel manuale non implica alcuna responsabilità da parte del produttore della macchina relativamente agli effetti di tali prodotti sugli articoli da lavare.
- Cambiamenti nella composizione, nelle condizioni, ecc. di cui il fabbricante non è al corrente possono influenzare la qualità del risultato finale.
- Consultare sempre le istruzioni del produttore dello strumento quando si utilizzano nuovi strumenti.
- Il dosaggio dipende dalla qualità dell'acqua. Per maggiori informazioni, consultare le specifiche del prodotto per le sostanze chimiche di lavorazione.

7.2 Detergente di pulizia

I seguenti detergenti possono essere ordinati presso i rivenditori Arjo.

Agente	Descrizione
■ARJO LIQUIDS FLUSHER DETERGENT	Detergente alcalino delicato per la pulizia automatizzata di contenitori per rifiuti biologici umani.
ARJO LIQUIDS FLUSHER RINSE	Soluzione alcalina delicata per il risciacquo automatizzato di contenitori per rifiuti biologici umani e delle tubazioni per evitare l'accumulo del calcare più resistente.

7.3 Posizionamento

La seguente illustrazione mostra un esempio di collocazione del detergente per il modello a pavimento.

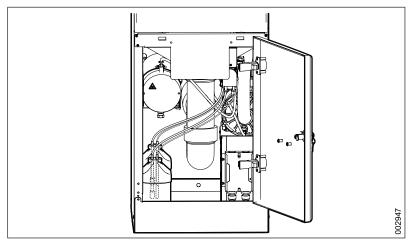


Figura 6. Esempio dell'ubicazione del detergente

7.4 Cambio





Per evitare danni agli occhi e alla pelle, utilizzare sempre occhiali e guanti protettivi. In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua. In caso di irritazione degli occhi o della pelle, rivolgersi a un medico. Leggere sempre la scheda tecnica di sicurezza del detergente.

Quando si sostituisce il flacone, verificare sempre che il detergente sia collegato correttamente. Il colore dell'anello sull'allarme di esaurimento (A) deve essere lo stesso del colore sul lato del flacone (B).

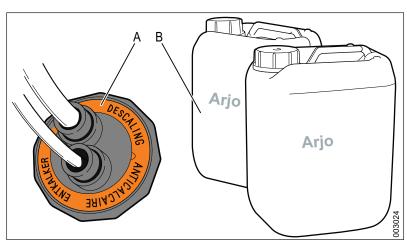


Figura 7. Verifica del detergente

8 QUALITÀ DELL'ACQUA



AVVERTENZA:

È responsabilità del cliente alimentare il termodisinfettore con acqua di qualità adeguata.

La qualità dell'acqua utilizzata in ogni fase di lavaggio è determinante per il conseguimento di buoni risultati di lavaggio.

8.1 Requisiti

L'acqua utilizzata in ogni fase deve essere compatibile con:

- il materiale di cui è costituita la macchina;
- le sostanze chimiche utilizzate nel ciclo;
- i requisiti di processo per le varie fasi del ciclo.

8.2 Fattori determinanti

I fattori determinanti per una buona qualità dell'acqua sono:

Durezza: una durezza elevata comporta la formazione di depositi di calcare nel termodisinfettore compromettendo i risultati di pulizia.

Contaminanti ionici: una concentrazione elevata di contaminanti ionici può provocare corrosione e puntinatura dell'acciaio inossidabile. Metalli pesanti come ferro, manganese o rame causano macchie agli strumenti.

Contaminanti microbici: gli articoli da lavare vengono disinfettati da microorganismi e relativi prodotti residui, che possono provocare sintomi simili a febbre in caso di contatto con il corpo umano. Utilizzare acqua che non aumenti il carica batterica.

Agenti chimici sanitari: concentrazioni elevate ed esposizione prolungata a prodotti chimici sanitari possono provocare corrosione e puntinatura dell'acciaio inossidabile.

8.3 Raccomandazione

- Arjo raccomanda che l'acqua utilizzata nelle fasi di prerisciacquo, lavaggio e risciacquo finale sia di qualità potabile secondo le linee guida.
- La qualità dell'acqua consigliata è acqua potabile con un massimo di 5 °dH.
- Per informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua, vedere "Guidelines for Drinking Water Quality" pubblicato dalla OMS.

8.4 Standard locale

Laddove gli standard locali sono più severi delle raccomandazioni di Arjo, devono essere osservati. Questo vale in particolare quando viene utilizzata acqua trattata per la fase di lavaggio finale/disinfezione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai produttori di sostanze chimiche e dispositivi medicali.

8.5 Standard locale, specifiche tipiche

Specifica tipica dell'acqua trattata:

рН	da 5,5 a 8
Conduttività	<30 μs.cm-1
TDS	<40 mg/l
Durezza massima	<50 mg/l
Cloro	<10 mg/l
Metalli pesanti	<10 mg/l
Fosfati	<0,2 mg/l sotto forma di P2O5
Silicati	<0,2 mg/l sotto forma di SiO2
Endotossine	<0,25 EU/ml
Numero totale di microorganismi	<100 per 100 ml

9 DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

	Plastica		Acciaio inossidabile	
	FD1600	FD1605 UB	FD1610	FD1615 UB
Peso totale kg/% del peso	90 / 100	65 / 100	100/ 100	75 / 100
Parti meccaniche				
Acciaio inossidabile	41 / 45,5	21 / 32,3	60 / 60	35 / 46,6
Acciaio	1 / 1,1	1 / 1,5	1 / 1	1 / 1,3
Ghisa	13 / 14,4	13 / 20	13 / 13	13 / 17,3
Rame	1 / 1,1	1 / 1,5	1 / 1	1 / 1,3
Plastica	25 / 27,7	25 / 38,4	16 / 16	16 / 21,3
Gomma	3 / 3,3	3 / 4,6	3/3	3 / 4
Altri componenti mecc.	2 / 2,2	2/3	2/2	2 / 2,6
Componenti elettrici/e	elettronici			
Cablaggi	1 / 1,1	1 / 1,5	1 / 1	1 / 1,3
Circuiti stampati	0,2 / 0,2	0,2 / 0,3	0,2 / 0,2	0,2 / 0,3
Altri componenti	2,8 / 3,1	2,8 / 4,3	2,8 / 2,8	2,8 / 3,7

9.1 Commenti

Gli altri componenti comprendono pompe, motori portellone ecc. che non possono essere pesati o suddivisi allo stesso modo delle altre parti. Non è presente mercurio nella macchina o nei relativi componenti.

9.2 Distribuzione

Le macchine sono imballate su pallet di legno e protette con cartone increspato oppure avvolte con pellicola plastica. Gli utenti devono provvedere alla separazione e al riciclaggio del materiale di imballaggio.

9.3 Utilizzo

Il disinfettore-lavapadelle ha un effetto sull'ambiente per l'intero ciclo di vita. La nostra valutazione è che l'alimentazione elettrica e il consumo d'acqua hanno il maggiore impatto sull'ambiente. In totale durante la vita utile le macchine utilizzano circa 11.000 kWh di elettricità e circa 1.300 m³ d'acqua. Vengono rilasciati circa 210 litri di detergente nel sistema di scarico, a seconda dei programmi/dosaggi della macchina.

9.4 Smaltimento dei rifiuti

Le macchine sono costituite essenzialmente da acciaio inossidabile, plastica/gomma/vetro e altri metalli riciclabili. In sede di smaltimento della macchina occorre riciclarne i materiali. Cablaggi e circuiti stampati contengono sostanze pericolose per l'ambiente come piombo, cadmio, PVC e brominato fuoco ritardante e devono essere riciclati come rifiuti elettronici. Plastica e gomma devono essere riciclate separatamente.

9.5 Pallet di caricamento

Il pallet in dotazione con la macchina è prodotto ed etichettato conformemente alla normativa ISPM 15. Questa etichetta indica che la confezione in legno è stata asciugata e trattata con calore, KD 56 °C/30 min.

10 SMALTIMENTO A FINE VITA



AVVERTENZA:

il prodotto può essere contaminato e deve essere disinfettato prima del riciclaggio.

Smontare e riciclare le apparecchiature che contengono componenti elettrici ed elettronici ai sensi della direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) o in conformità alla normativa locale o nazionale.

Liquidi di disinfezione: smaltire eventuali residui di liquidi di disinfezione nello scarico con acqua corrente. Tali prodotti sono idrosolubili e vengono normalmente diluiti in acqua per le operazioni di pulizia. Questi detergenti saranno trattati dal comune di pertinenza con le stesse modalità utilizzate per il loro trattamento dopo il normale utilizzo per fini di pulizia.

Riciclare i contenitori per imballaggio in conformità alle norme nazionali o locali.

11 DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

Simbolo	Spiegazione
	Avvertenza
	Avvertenza, superficie calda
<u>A</u>	Avvertenza, tensione pericolosa
	Indossare guanti protettivi
	Indossare occhiali protettivi
	Fare riferimento al Manuale di istruzioni/opuscolo - Leggere le Istruzioni per l'uso
	Nome e indirizzo del produttore
	Data di produzione
\Box	Data di scadenza
REF	Numero di catalogo
SN	Numero di serie
MD	Indica che il prodotto è un dispositivo medico in base al regolamento dell'UE sui dispositivi medici 2017/745
UDI	Identificativo univoco del dispositivo
C € 2797	Marcatura CE attestante la conformità adattata alla legislazione della Comunità europea Le cifre indicano la supervisione di un organismo notificato
IP22	IP = Protezione Ingresso, un valore nominale per la protezione contro l'ingresso meccanico e l'ingresso di acqua
WaterMark WMTS104 LICHMMC8397 SAI Global _{JOUANDER}	Etichetta di certificazione "WaterMark" con numero di licenza WMK26397

Simbolo	Spiegazione
WRAS APPROVED	Normative sull'approvvigionamento idrico (raccordi idrici) e regolamenti idrici in Scozia
c us Intertek	Marchio di certificazione Intertek Warnock Hersey
c Larrow Us Intertek 5009941	Etichetta test elettrici. Indica la certificazione ETL tramite Intertek. La prova della conformità del prodotto agli standard di sicurezza nordamericani
DVGW CERT Anschlusssicher W 540	Certificato di conformità DVGW CERT
kiwa certified BRL-K14011	Certificazione di sicurezza dei Paesi Bassi per la sicurezza dell'acqua
	Separare i componenti elettrici ed elettronici per poterli riciclare in conformità con la Direttiva Europea 2012/19/EU (RAEE)
HDPE	Riciclabile, il numero (2) indica polietilene ad alta densità

12 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Ambiente previsto: ambiente elettromagnetico industriale

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore – emissione elettromagnetica					
Test di emissione	Conformità	Direttive			
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	L'apparecchiatura utilizza energia RF solo per le sue funzioni interne. Di conseguenza, le sue emissioni RF sono molto basse e non tali da causare alcuna interferenza nelle apparecchiature elettroniche che si trovano nelle vicinanze.			
Emissioni Radio Frequenza CISPR 11	Classe A	L'apparecchiatura è idonea per essere utilizzata in tutti gli ambienti, ivi compresi gli ambienti domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione che fornisce elettricità agli edifici a uso residenziale.			

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica					
Test di immunità	Livello di test IEC 60601-1-2 / criterio di prestazione	Livello di conformità / criterio di prestazione			
Scarica elettrostatica (EDS) IEC 61000-4-2	±4 kV scarica di contatto / B ±8 kV scarica di aria / B	±4 kV scarica di contatto / B ±8 kV scarica di aria / B			
Disturbi condotti, indotti da campi Radio Frequenza IEC 61000-4-6	3 V in frequenze da 0,15 MHz a 80 MHz / A	3 V in frequenze da 0,15 MHz a 80 MHz / A			
Campo elettromagnetico Radio Frequenza irradiato IEC 61000-4-3	10 V/m (da 80 MHz a 1 GHz) / A 3 V/m (da 1,4 GHz a 2 GHz) / A 1 V/m (da 2 GHz a 2,7 GHz) / A	10 V/m (da 80 MHz a 1 GHz) / A 3 V/m (da 1,4 GHz a 2 GHz) / A 1 V/m (da 2 GHz a 2,7 GHz) / A			
Transitori elettrici rapidi/burst IEC 61000-4-4	±2 kV porta CA / B Frequenza di ripetizione di 5 kHz	±2 kV porta CA / B Frequenza di ripetizione di 5 kHz			
Campo magnetico a frequenza di rete IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz o 60 Hz / A	30 A/m 50 Hz / A			
Sovratensione transitoria IEC 61000-4-5	±1 kV da linea a linea / B ±2 kV da linea a terra / B	±1 kV da linea a linea / B ±2 kV da linea a terra / B			
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di alimentazione elettrica in ingresso IEC 61000-4-11	0% UT; 1 ciclo / B 40% UT 10/12 cicli* / C 70% durante 25/30 cicli* / C 0% durante 250/300 cicli* / C	0% UT; 1 ciclo / B 40% UT 10/12 cicli* / C 70% durante 25/30 cicli* / C 0% durante 250/300 cicli* / C			
*Per esempio: "25/30 cicli" indica "25 cicli per test a 50 Hz" o "30 cicli per test a 60 Hz".					
Nota: UT è la tensione di rete CA prima dell'applicazione dei livelli di test.					

AUSTRALIA Arjo Australia Building B, Level 3 11 Talavera Road

Macquarie Park, NSW, 2113,

Australia

Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË Arjo Belgium Evenbroekveld 16 9420 Erpe-Mere

Phone: +32 (0) 53 60 73 80 Fax: +32 (0) 53 60 73 81 E-mail: info.belgium@arjo.com

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02

Galpão - Lapa São Paulo - SP - Brasil CEP: 05040-000 Phone: 55-11-3588-5088 E-mail: vendas.latam@arjo.com E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.

90 Matheson Boulevard West

Suite 350

CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3

Tel/Tél: +1 (905) 238-7880 Free: +1 (800) 665-4831 Fax: +1 (905) 238-7881 E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o. Ná Strzi 1702/65 140 00 Praha

Czech Republic Phone No: +420225092307 E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S

Vassingerødvej 52 DK-3540 LYNGE Tel: +45 49 13 84 86 Fax: +45 49 13 84 87

E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH

Peter-Sander-Strasse 10 DE-55252 MAINZ-KASTEL Tel: +49 (0) 6134 186 0 Fax: +49 (0) 6134 186 160 E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA

ARJO IBERIA S.L. Poligono Can Salvatella c/ Cabanyes 1-7 08210 Barberà del Valles Barcelona - Spain

Telefono 1: +34 900 921 850 Telefono 2: +34 931 315 999 **FRANCE** Arjo SAS

2 Avenue Alcide de Gasperi

CS 70133

FR-59436 RONCQ CEDEX Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13 Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14 E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre, 8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,

HONG KONG Tel: +852 2960 7600 Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo Italia S.p.A.

Via Giacomo Peroni 400-402

IT-00131 ROMA

Tel: +39 (0) 6 87426211 Fax: +39 (0) 6 87426222 E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC Office 908, 9th Floor, HQ Building, North Tower, Dubai Science Park, Al Barsha South P.O. Box 11488. Dubai. United Arab Emirates Direct +971 487 48053 Fax +971 487 48072

Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV Biezenwei 21 4004 MB TIEL Postbus 6116 4000 HC TIEL

Tel: +31 (0) 344 64 08 00 Fax: +31 (0) 344 64 08 85 E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd 34 Vestey Drive Mount Wellington NZ-AUCKLAND 1060 Tel: +64 (0) 9 573 5344 Free Call: 0800 000 151 Fax: +64 (0) 9 573 5384 E-mail: nz.info@Arjo.com

Arjo Norway AS Olaf Helsets vei 5 N-0694 OSLO Tel: +47 22 08 00 50 Faks: +47 22 08 00 51

E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH

Arjo Austria GmbH

Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.0G

A-1230 Wien Tel: +43 1 8 66 56 Fax: +43 1 866 56 7000 POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.o. ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)

Tel: +48 691 119 999 E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo) Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G PT-1600-233 Lisboa Tel: +351 214 189 815 Fax: +351 214 177 413

E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ Arjo Switzerland AG

Fabrikstrasse 8 Postfach

CH-4614 HÄGENDORF Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77 Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Arjo Scandinavia AB Riihitontuntie 7 C 02200 Espoo Finland

Puh: +358 9 6824 1260

E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVFRIGE

Arjo International HQ Hans Michelsensgatan 10 SE-211 20 MALMÖ Tel: +46 (0) 10 494 7760 Fax: +46 (0) 10 494 7761 E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland Houghton Hall Park Houghton Regis

UK-DUNSTABLE LU5 5XF Tel: +44 (0) 1582 745 700 Fax: +44 (0) 1582 745 745 E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.

2349 W Lake Street Suite 250 US-Addison, IL 60101 Tel: +1 (630) 307-2756 Free: +1 (800) 323-1245 Fax: +1 (630) 307 6195 E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K. 東京都港区虎ノ門三丁目7番8号 ランディック第2虎ノ門ビル9階 Tel: +81 (0)3-6435-6401 Fax: +81 (0)3-6435-6402 E-mail: info.japan@arjo.com

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.



ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö, Sweden www.arjo.com

