



	FUNKTION
1	Blinkande gul: Det går att avbryta programmet. Gul: Ett program körs. I teckenfönstret visas statusinformation, t ex rengöringsfas och temperatur.
2	Grön: Programmet är klart. Lampan släcks när dörren öppnas och under en kort tid visas en programsammanfattning i teckenfönstret, t ex maxtemperatur.
3	Röd: Felindikering. I teckenfönstret visas ett felmeddelande.
4	Teckenfönster. En servicetekniker kan ställa in vilken information som ska visas i teckenfönstret.
5	Knapp för att välja ekonomiprogram för lätt smutsat gods.
6	Knapp för att välja normalprogram för normalt smutsat gods.
7	Knapp för att starta ett program.

KOD	BESKRIVNING	ÅTGÄRD
U1	Kalkbindande medel låg nivå	Fyll på kalkbindande medel.
U2	Processmedel låg nivå	Fyll på processmedel.
U3	Klarmedel låg nivå	Fyll på klarmedel.
U7	Varning för hög godstemperatur	Låt godset svalna.
U9	Inaktivitetsvarning	Maskinen har varit inaktiv i 72 timmar. Ett program med tom kammare måste köras innan maskinen används för rengöring av gods.
H6	Startförsök med öppen lucka	Stäng luckan (maskinen gör ett nytt startförsök.) Kontakta behörig servicepersonal om felet kvarstår.
H7	Kan inte låsa luckan	Kvittera felet. Stäng luckan ordentligt. Gör ett nytt startförsök. Kontakta behörig servicepersonal om felet kvarstår.
H8	Kan inte låsa upp luckan	Kvittera felet. Kontakta behörig servicepersonal om felet kvarstår.

För felkoder av typen F, se "Instruktioner för användning".