



FD1800, FD1805

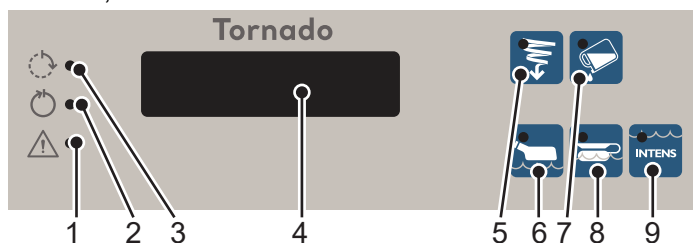

FD1810

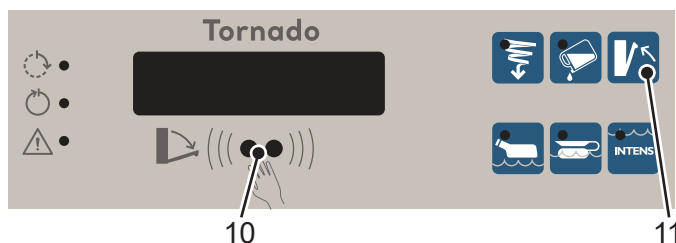

FUNKTION

1	Rød: Fejlangivelse. Displayet viser en fejlmeddelelse.
2	Grøn: Programmet er gennemført. Lampen slukker, når døren åbnes, og displayet viser kortvarigt en programopsummering i vinduet, f.eks. maks. temperatur.
3	Blinker gult: Programmet kan afsluttes. Gul: Et program er i gang. Displayet viser den aktuelle status, f.eks. rengøringsfase og temperatur.
4	Display. En servicetekniker kan indtaste de oplysninger, der skal vises i displayet.
5	Knap til valg af randskyllning.
6	Knap til valg af økonomiprogram for let urene emner.
7	Knap til valg af rengøringsmiddel (ekstraudstyr).
8	Knap til valg af normalt program til normalt urent gods.
9	Knap til valg af intensivt program til svært urent gods.
10	IR-sensor til åbning/lukning af døren og til start af det forvalgte program (ekstraudstyr).
11	Knap til åbning/lukning af døren (ekstraudstyr).

KODE	BESKRIVELSE	HANDLING
U1	Afkalker, lavt niveau	Påfyld afkalkningsmiddel.
U2	Detergent, lavt niveau	Påfyld procesmiddel (ekstraudstyr).
U3	Afspændingsmiddel, lavt niveau	Påfyld procesmiddel (ekstraudstyr).
U6	Tid til eftersyn	Kontakt autoriseret servicepersonale.
U7	Advarsel om brændende varme emner	Lad godset køle ned.
U8	Ekstern kommunikation	Ekstern forbindelse afbrudt.
U9	Inaktivitets-advarsel	Maskinen har været inaktiv i 72 timer. Der skal køres et program med tomt kammer, før maskinen bruges til rengøring af gods.
H1	Afkalkerbeholder tom	Påfyld afkalkningsmiddel.
H3	Skyllemiddel tom	Påfyld skyllemiddel.
H6	Forsøg på start med åben dør	Luk døren (maskinen forsøger at starte igen). Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis fejlen opstår igen.
H7	Batteri lavt	Kontakt autoriseret servicepersonale.

*Se i Brugsvejledning vedr. fejlkoder af type F.