

**Kjør/Standby-knapp**

Trykk for å aktivere pumpen. De grønne indikatorene på kontrollpanelet og fronten på pumpen tennes.

Trykk og hold inne i tre sekunder for Standby. Den grønne indikatoren blinker to ganger hver 2. sekund for å angi Standby.

**Dempeknapp**

Trykk for å dempe lydalarmer. Den gule indikatoren tennes når lydalarmer er dempet.

**Reaktiv (KLT) modus**

Trykk for Reaktiv (konstant lavt trykk) (KLT), ikke-alternerende modus. Den gule indikatoren tennes.

Trykk på nytt for Aktiv (alternerende) modus (standard). Den gule indikatoren slukkes.

**Autofirm-modus**

Trykk og hold inne i to sekunder for Autofirm-modus. Danner en midlertidig fast overflate for å tillate pleieprosedyrer. Indikatoren for Reaktiv (KLT) og Komfortkontroll tennes.

Etter 15 minutter går pumpen tilbake til forrige innstilling – Komfortindikatorene blinker + en serie pipesignaler. For å forlenge i 5 minutter: Trykk på en av komfortknappene. Maksimal varighet er 30 minutter.

**Komfortregulering**

Trykk på knappene for å justere trykket i madrassen eller setecellene slik at det er behagelig for pasienten. Trykkinnstillingen vises av den grønne indikatoren til venstre.

**Venteindikator**

Forblir tent inntil madrassen/setet er blåst helt opp.

**Indikator for lavt trykk**

Lyser, med lydalarm, når pumpen registrerer lavt trykk i madrassen/setet. Når normalt trykk er nådd, slukkes indikatoren.

**Indikator for lavt batterinivå**

Tennes to timer før batteriet lades ut. Pumpen går som standard til Reaktiv (KLT)-modus 1 time før batteriet er helt utladet. Det høres en alarm og den gule indikatoren lyser fremdeles. (Batteripakke er ekstrautstyr)

**Strømbruddindikator**

Tennes, og en lydalarm høres, hvis et strømbrudd registreres og batteri ikke er tilgjengelig. Alarmen fortsetter til strømforsyningen er tilbake eller pumpen slås av. Koble slangesettet fra pumpen for å sette madrassen i transportmodus.

**Service-indikator**

Tennes etter et angitt antall driftstimer, og indikerer at pumpen er klar for service. Pumpen fortsetter å fungere normalt mens serviceindikatoren er på.