


## Monter overmadrassen eller madrasserstatningen og pumpen


**1**

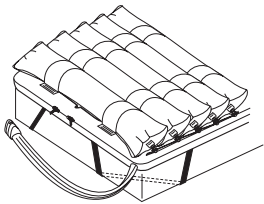

- slangesett i fotenden
- HLR i hodeenden
- cellene vender opp

**Overmadrass:**  
Legg oppå basemadrassen.  
Bruk de fire hjørneremmene til å feste den.

**Madrasserstatning:**  
Legg på sengebunnen. Bruk de åtte remmene til å feste bevegelige deler på sengerammen.

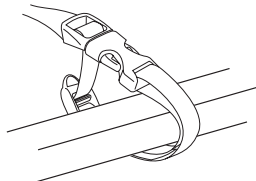

**2**

**ARJO**  
Auto Logic



Lukk det beskyttende trekket med glidelås over madrassen slik at Arjo-logoen er i fotenden.

**3**



«Klikk»

HLR-enheten klikkes i lukket stilling.

**4**



Sett pumpen på en vannrett overflate, eller heng den i sengens fotskinne.

**5**



Koble til slangesettet.  
Koble støpselet til en stikkontakt.


**6**



Legg strømkabelen langs madrassens side. Fest klaffen rundt kabelen med trykknappene.

## Installer setepute og pumpe

**1**

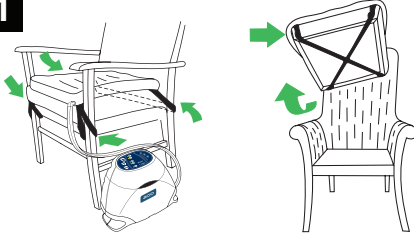


**Stolens forside**

**Stolens bakside**

- cellene vender opp
- slangesett foran i høyre hjørne
- celle horisontalt over stolen, V-form vendt fremover

**Setepute:**  
Legg den på stolens overflate.  
Bruk festeremmene til å feste den.

**2**

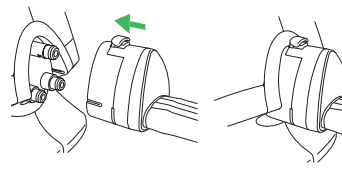

Koble til slangesettet.  
Koble støpselet til en stikkontakt.

## Hurtigstart

**1**

- Pumpen og madrassen eller seteputen installert på riktig måte.
- HLR-kontrollen klikkes i lukket stilling.
- Pumpens egensjekk:  
Pipesignal – 10 sekunder  
– pipesignal – klar til bruk.


**2**




Trykk på Kjør/standby-knappen.  
Vent til den er blåst helt opp:  
**Overmadrass:** 7 minutter  
**Madrasserstatning:** 15 minutter  
**Setepute:** 3 minutter

**3**


**ADVARSEL**  
HLR-kontrollen må hele tiden være synlig og tilgjengelig.



Når Vent-indikatoren slås av, legger du lakenet på madrassen og legger pasienten på madrassen eller seteputen.  
Standardinnstilling er Aktiv modus (alternerende trykk).

## HLR-kontroll (kun madrasser)

1

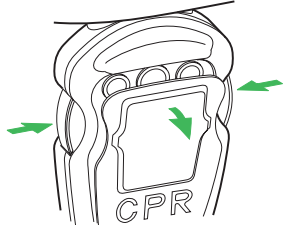

### Aktivere:

Trykk på de to HLR-utløserknappene samtidig.

2



### Tilbakestille:


Trykk foran på HLR-enheten til den klikker på plass.

## Autofirm-modus

1



**Aktivere:** Trykk og hold inne knappen. Komfortindikatorene blinker og tennes i rekkefølge.

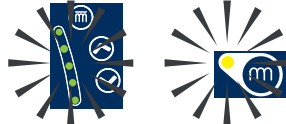

Trykk oppnådd:

- Komfortindikatorene tennes
- Pumpen piper tre ganger
- Reaktiv (KLT)-indikatoren tennes

2



**Deaktivere:** Trykk og hold inne knappen.




### Forleng:

Komfortindikatorene blinker + serier med pipetoner: Trykk på en av komfortknappene for å forleng i fem minutter. Maks 30 minutter.

## Transportmodus (kun madrasser)


1

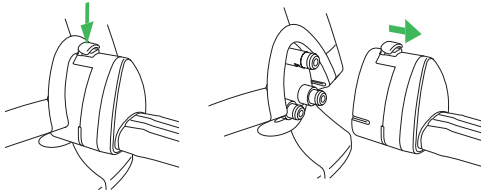

### Aktivere:

Trykk ned knappen og trekk i slangesettkoblingen. Madrassen støtter pasienten i opptil 12 timer.

2

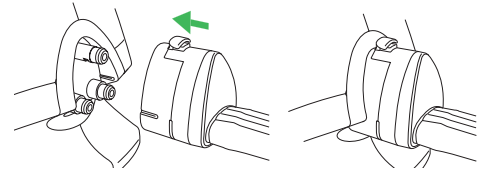

**Gjenoppta normal funksjon:**  
Koble til slangesettet igjen.

## Rengjøring og desinfeksjon

Rengjør og desinfiser mellom pasienter og regelmessig mens den er i bruk.



### ADVARSEL

Fjern strømforsyningen til pumpen før rengjøring ved å koble strømledningen fra strømnettet eller fjerne batteripakken.

Bruk alltid verneklær når dekontaminering utføres.

### Rengjøring

1. Rengjør alle eksponerte overflater og fjern eventuelle rester ved å tørke av med en klut som er fuktet med et nøytralt vaskemiddel og vann.
2. Tørk grundig. La ikke vann eller vaskemiddel samle seg på pumpen.

### Kjemisk desinfisering

Bruk et klorutløsende middel, for eksempel natriumhypokloritt, med en styrke på 1000 ppm tilgjengelig klor (fra 250 ppm til 10 000 ppm avhengig av lokalt regelverk og kontamineringsstatus).

Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler (styrke 70 %) kan brukes som alternativ.

Hvis et annet desinfeksjonsmiddel velges, må kjemikalieleverandøren bekrefte at dette er egnet for bruk.

1. Tørk av alle rengjorte overflater med løsningen.
2. Tørk av med en klut fuktet med vann.
3. Tørk grundig.

### Termisk desinfisering

Se etiketten for informasjon om vask av madrassstrekket.