

Alpha Active 3

Hensikten med denne hurtigveiledningen er kun å hjelpe helsearbeidere og andre brukere med systemets funksjonelle sider. Veiledningen erstatter ikke de generelle sikkerhetsadvarslene, forsiktighetsadvarslene og anbefalingene i bruksanvisningen, delenummer 648934XX.


Se bruksanvisningen før du bruker dette produktet.

Anvisninger:

- Alpha Active® 3 madrass er konstruert for pasienter med en vekt på opptil 135 kg (300 lb).
- Alpha Active 3-systemet er indisert for forebygging og/eller behandling av alle typer trykksår¹, ved kombinasjon med en personlig tilpasset, omfattende trykksårprosedyre, for eksempel stillingsskift, ernæringshjelp, hudpleie.

Kontraindikasjoner: Systemet må ikke brukes på pasienter med ustabile ryggfrakturer.

Forsiktig: Be om råd fra en kliniker før bruk hvis pasienten har andre ustabile brudd eller sykdommer som kan kompliseres av en myk eller bevegelig overflate.

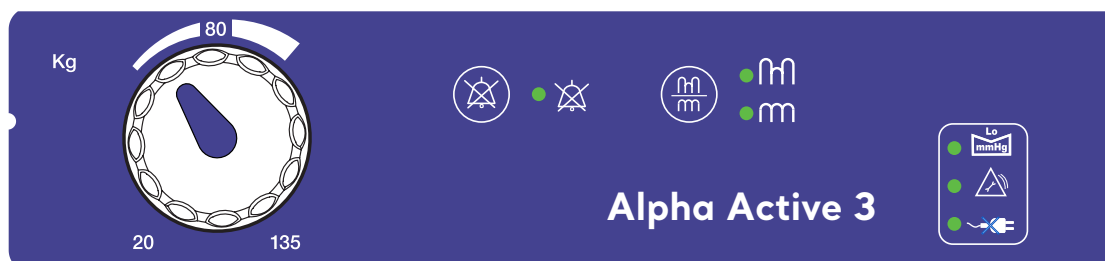

På/av-knapp - hvis du trykker på **På/av**-knappen, aktiveres pumpen.




Alarmdemping - Hvis alarmen utløses, kan den slås av ved å trykke knappen for alarmdemping. Den gule lampen forblir på, men alarmlyden slås av.



Modusvelger - Med modusvelgeren kan du velge driftsmodus.

To driftsmoduser er tilgjengelige: alternerende eller statisk (ikke-alternerende). Lampen ved siden av det respektive ikonet angir hvilken modus som er valgt.

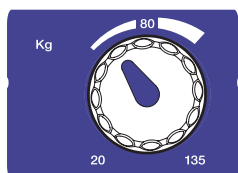

Trykkregulering - denne knappen brukes til manuell innstilling av trykket i overmadrassen, og dermed mengden støtte pasienten får.



Indikatoren for **lavt trykk** tennes hvis pumpen registrerer lavt trykk i madrassen. En alarmlyd utløses hvis den ikke er slått av med demp-knappen.

Lampen slukker så snart normalt trykk er nådd.



Lampen for **service/pumpefeil** tennes og forblir på hvis pumpen har oppdaget en intern feil. En servicetekniker bør kontaktes.




Lampen for **strømbrydd** tennes når det er oppdaget en svikt i strømforsyningen. En lydalarm høres til strømmen kommer tilbake eller pumpen skrus av ved hjelp av av/på-knappen.

1. NPUAP/EPUAP Internasjonal veiledning for trykksår, 2014.

Installasjon

Overmadrass

Plasser overmadrassen på madrassunderdelen, med slangesettet nær sengens fotende. Overmadrassen må være øverst

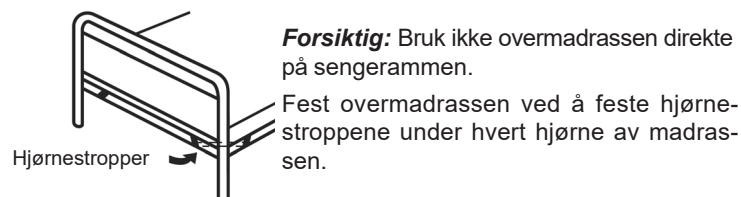

Slik fullfører du madrassmonteringen

Lukk glidelåsen i beskyttelsestrekket på madrassen/overmadrassen. Sørg for at Arjo-logoen er øverst og ved fotenden av madrassen/overmadrassen. Kontroller at HLR-enheten er festet i lukket stilling.

Installere pumpen

Plasser pumpen med beina ned mot en hvilken som helst passende horisontal overflate eller heng den fra gjerdet ved fotenden av senga ved hjelp av de integrerte hengefestene.

Kontroller at at madrassens slangesett ikke er "bøyd" eller vridd, koble det til pumpen og lås det. Kontroller at slangesettet er koblet ordentlig til pumpen.

Koble støpselet til passende stikkontakt.

Hurtigstart:

Trykk på **av/på**-knappen på siden av pumpen. Vent ca. 30 minutter mens madrassen blåses helt opp.

Advarsel: Ikke plasser pasienten på madrassen før den er helt oppblåst.

Legg et laken på overmadrassen og fold det løst rundt den.

Kontroller at HLR-enheten er lett synlig i hodeenden av sengen.

Prosedyre for innstilling av støtte

Legg eller sett pasienten på madrassen.

Still inn trykkregulatoren på pumpen i forhold til pasientens vekt. Dette bør bare være veiledende. En uavhengig klinisk bestemmelse må bekrefte at pasienten støttes tilstrekkelig.

Vent 10 minutter mens pumpen justerer trykket.

SENTEGRINDER

Se alltid lokale regler OG bruksanvisningen for bruk av sengegrinder.

Endringer i pasientens stilling:

Når en pasient ligger (på ryggen), er kroppsvekten fordelt over et stort område. I sittende stilling er kroppsvekten konsentrert over et langt mindre område og krever derfor mer støtte enn i liggende stilling.

Derfor kan det være nødvendig å justere innstillingene på trykkregulatoren når pasienten skifter stilling, for å få maksimal nytte av støtteflaten.

Fra liggende til sittende - Øk trykket.

Fra sittende til liggende - Reduser trykket.

Denne justeringen bør foretas i forbindelse med uavhengig klinisk bestemmelse av tilstrekkelig støtte.

Statisk - Gir et stabilt, ubevegelig støtteunderlag for tilfeller der et underlag med aktiv behandling er kontraindisert. I statisk modus forblir støtteflaten konstant (alle celler er like mye oppblåst). Ytterligere pleiervurdering må foretas for å legge opp en tilpasset vendesyklus.

Når systemet brukes i statisk modus, kan det være nødvendig å redusere trykkinnstillingen av hensyn til pasientens komfort og sikkerhet.

Transportmodus

Pasienten kan transporteres på *Alpha Active* overmadrass.

1. Koble slangesettet fra pumpen.
2. Sett den medfølgende hetten over enden av slangesettet.

Når hetten er satt på, vil madrassen automatisk settes i transportmodus.

Pasienten forblir støttet av madrassen i opptil 12 timer.

Hvis du vil gjenoppta normal drift, kobler du til slangesettet igjen og lar pumpen gå.

Forsiktig


Transportmodus er et ikke-terapeutisk og tilbyr støtte i bare opp til 12 timer. Det anbefales at pasienten overvåkes ofte i transportmodus.

RASK TØMMING VED HJERTESTANS

Hvis pasienten får hjertestans og hjerte- lungeredning må gjennomføres:

Aktivere rask tømming:

En rød stropp merket CPR (HLR) er montert i hodeenden av overmadrassen (på samme side som slangesettet). Ved hjertestans skal du dra denne ut av madrassen for å tømme den for luft.

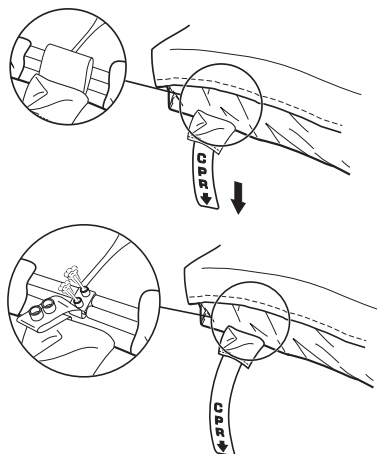

Tilbakestille rask tømming:

Sett stopperen tilbake på plass, og koble luftslangene til pumpen igjen.

© og ™ er varemerker for selskapene i Arjo-gruppen.

© Arjo 2022.

Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design uten forutgående varsel.

Innholdet i denne publikasjonen må ikke kopieres, verken i sin helhet eller delvis, uten samtykke fra Arjo.

