

Nimbus 4 & Nimbus Professional



Tænd/Standby-knap

Tryk for driftstilstand. Indikatoren skifter til grøn.

Tryk og hold den nede i 3 sekunder for Standby. Indikatoren slukker.



Knappen Statisk

Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at vælge tilstanden Statisk. Der afgives et akustisk signal, og indikatoren lyser - pumpen er i tilstanden Statisk.

Tryk på knappen, og hold den inde i 3 sekunder for at vende tilbage til tilstanden Dynamisk (vekslende tryk).



Knap til alarmdæmpning

Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at dæmpe en lydalarm. Indikatoren lyser, når lydalarmlarmen er dæmpet.



Komfort-betjeningsselement

Fastere indstilling = drej med uret
Blødere indstilling = drej mod uret



Alarmsymbol

Lyser, med hørbar alarm, under Lavt tryk, Højt tryk, Pumpefejl eller Strømsvigt.



Vent-indikator

Lyser, indtil madrassen er fyldt med luft (15 minutter).



Indikator for højt tryk

Lyser, med lydalarm, når pumpen registrerer et højt tryk i madrassen.

Sørg for, at slangesættet ikke er bukket.



Indikator for lavt tryk

Lyser, med lydalarm, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen.

Sørg for, at CPR-enheden er lukket, at slangesættet er tilsluttet korrekt, og at madrassen er indstillet til Normal.



Indikator for strømsvigt

Lyser, med hørbar alarm, når der registreres en strømsvigtfejl. Alarmen fortsætter med at lyde, indtil netstrømmen retableres, eller der trykkes på Tænd/Standby-knappen for at sætte pumpen på Standby. Hvis strømsvigten varer i længere tid, skal der skiftes til Transporttilstand, og slangerne skal afbrydes.



Indikator for pumpefejl

Lyser, når der registreres en intern funktionsfejl i pumpen. Ring efter en servicetekniker.




Serviceindikator

Lyser efter et indstillet antal driftstimer for at angive, at pumpen skal have et serviceeftersyn. Pumpen fortsætter med at fungere normalt, selv om Service-indikatoren er tændt.

Madrassens CPR- og transportkontrolenheder

CPR-kontrolenhed

Skal anvendes, hvis en plejemodtager får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR): Tømmer hurtigt luften ud af madrassen.

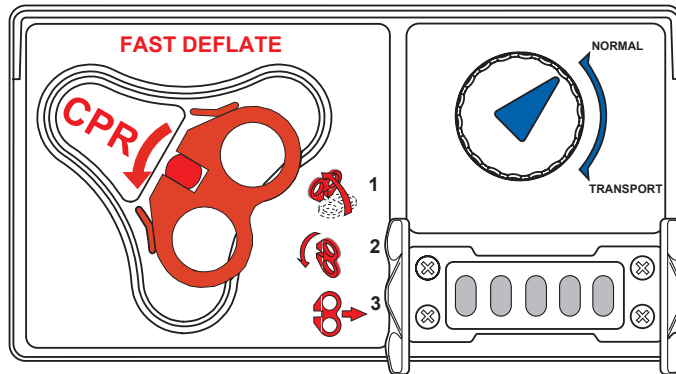


Transport-kontrolenhed

Drej med uret til tilstanden Transport. Madrassen er forseget, og der er et jævnt tryk i støtteunderlaget; pumpen og/eller slangesættet kan fjernes. Trykafaster plejemodtageren i op til 12 timer.

Udluftningsventilkontrol


- For permanent trykafastning: tøm kun luften ud af maks. én celle direkte under det område, du vil lindre.
- Kun for midlertidige plejeprocedurer: tøm luften ud af en eller flere tilstødende celler, fyld luft i igen, når plejeproceduren er afsluttet.
Tømning af en eller flere tilstødende celler kan påvirke plejemodtagerens støtte under den normale dynamiske tilstand.
- Er plejemodtagerens behov komplekse, kan mere end ét område aflastes i længere perioder:
 - Tøm kun luften ud af en celle i torsosektionen.
 - Tøm kun luften ud af én celle i læg- eller hælesektionen.
 - Tøm kun luften ud af én celle i hovedsektionen, når plejemodtageren er i rygleje, eller alle tre celler i hovedsektionen, når plejemodtageren ligger på maven.Tømning af flere celler i hvert område kan påvirke plejemodtagerens støtte under den normale dynamiske tilstand.

Nimbus 4

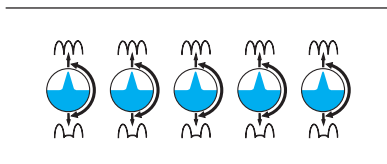

Udluftningsventiler ved Heelguard-celler

Nimbus Professional

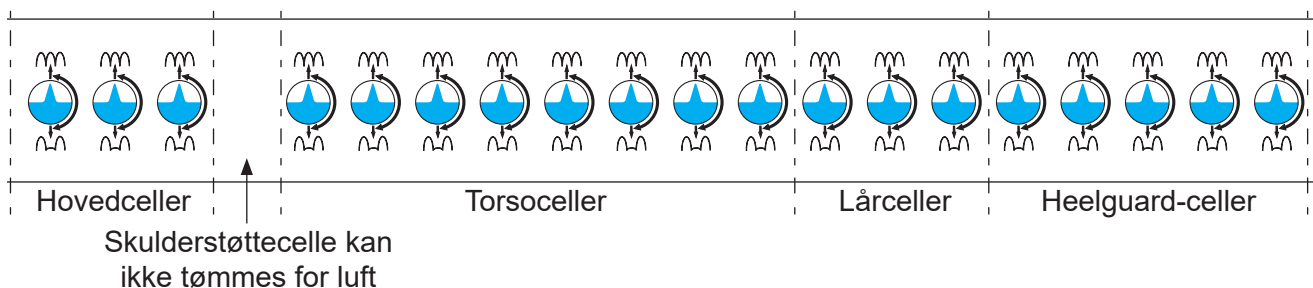

Lukket



Åbent



Tøm luften ud af en celle:
drej udluftningsventilen i urets
retning, så den peger nedad.

