


Nimbus Professional

Colocación en decúbito prono

- Los procedimientos de colocación en decúbito prono solo pueden ser realizados por personal debidamente formado. Siga el protocolo establecido por el hospital para colocar a pacientes críticos en decúbito prono.
- Cuando corresponda, deberán usarse barandillas de seguridad en la cama, respetando la política del hospital.
- La siguiente información tiene como objetivo servir de guía rápida para el correcto uso del colchón al colocar un paciente en decúbito prono. Consulte las instrucciones de uso del producto para obtener indicaciones detalladas y otra información importante.

1

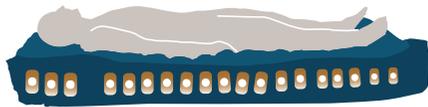

Coloque al paciente en posición supina sobre el colchón. Sitúelo de manera que los hombros estén alineados con la 4.ª celda empezando por la parte superior del colchón.

Pulse el botón del modo estático para poner el compresor en dicho modo, de manera que las celdas del colchón se mantengan continuamente infladas por igual.

A fin de garantizar la correcta colocación del paciente sobre el colchón, este debe estar en posición estable y sin alternar mientras se efectúa el giro del paciente.



Todas las válvulas Wound Valve deben estar cerradas y apuntando hacia arriba (lo cual indica que todas las celdas del colchón están infladas).



Las válvulas Wound Valve solo se deberán abrir cuando determinadas celdas tengan que permanecer desinfladas durante periodos prolongados. Consulte las instrucciones de uso del producto para obtener información detallada.




Seleccione el modo estático. El encendido del indicador amarillo del botón confirma que el modo de operación vigente es el estático.



Ajuste el control de comodidad en la posición de firmeza.

2

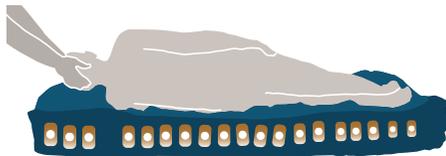

Si se necesita desinflar la sección de la cabeza, abra las válvulas Wound Valve de las tres celdas de la sección de la cabeza para desinflarlas.

La persona responsable de la gestión de las vías respiratorias y de la colocación de la cabeza se sitúa en el cabecero de la cama para coordinar el procedimiento de giro.

Mueva al paciente a un lado de la cama, hasta donde resulte seguro y cómodo. Gire al paciente hasta colocarlo en posición lateral / de costado.



Si es preciso desinflar la sección de la cabeza, abra las válvulas Wound Valve de las tres celdas de la sección de la cabeza de manera que solo se desinflen las celdas de dicha sección.



En este punto, el resto de las válvulas Wound Valve deberán permanecer cerradas.




Mantenga el modo estático.



El control de comodidad permanece ajustado en la posición de firmeza.

3

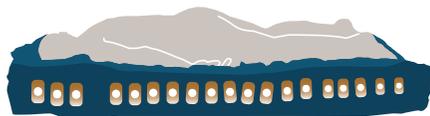

Sujete la cabeza del paciente y gírelo lentamente hasta colocarlo en decúbito prono.

Los hombros del paciente deberán estar situados sobre la 4.^a celda desde la parte superior del colchón.

Asegúrese de que las vías y el equipo de supervisión no queden atrapados bajo el cuerpo del paciente.

Ajuste la posición de la cabeza usando almohadas, espuma o almohadillas de gel, a fin de obtener una postura cómoda sin hiperextensión.



Todas las válvulas Wound Valve deben apuntar hacia arriba (todas las celdas infladas), excepto las válvulas correspondientes a la sección de la cabeza, que deberán estar abiertas si es preciso desinflar dicha sección.



Se mantiene el modo estático.



El control de comodidad permanece ajustado en la posición de firmeza.

4



Seleccione el modo de presión alterna pulsando el botón del modo estático. El indicador amarillo ya no está encendido.

Coloque las extremidades y la cabeza del paciente tal como indica el protocolo del hospital para la colocación en decúbito prono.

Con la tecnología Wound Valve, se pueden desinflar determinadas celdas para descargar la presión en zonas del cuerpo sensibles, por ejemplo, las celdas situadas bajo los dedos de los pies y bajo la zona genital. Consulte las instrucciones completas en el documento Instrucciones de uso del producto.

Deberán efectuarse comprobaciones periódicas para evitar las acumulaciones de presión, especialmente en aquellas zonas que sean anatómicamente sensibles.



Ajuste determinadas válvulas Wound Valve según corresponda para descargar la presión en puntos anatómicos específicos.

- Desinfe solo una celda en la sección del torso.
- Desinfe solo una celda en la sección de la pantorrilla y el talón.

No desinfe ninguna celda más en cada zona, ya que podría afectar al soporte del paciente durante el ciclo alternante normal.



Seleccione el modo alterno pulsando una vez el botón del modo estático. El indicador amarillo ya no está encendido.



Ajuste el control de comodidad según corresponda.