


Nimbus Professional

Sistemazione in posizione prona

- Le procedure di sistemazione in posizione prona devono essere eseguite esclusivamente da personale adeguatamente addestrato. Attenersi al protocollo ospedaliero relativo alla sistemazione in posizione prona dei pazienti in condizioni critiche.
- Le spondine di sicurezza del letto devono essere utilizzate quando opportuno e secondo il protocollo ospedaliero.
- Le seguenti informazioni sono una guida rapida all'uso del materasso durante la sistemazione del paziente in posizione prona. Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del prodotto per indicazioni dettagliate e altre informazioni importanti.

1

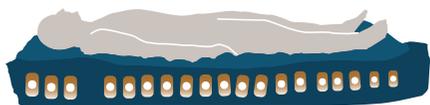

Collocare il paziente in posizione supina sul materasso. Posizionare il paziente in modo che le spalle siano in linea con la 4a cella dalla parte superiore del materasso.

Premere il pulsante Statica per mettere la pompa in modalità Statica, in modo che la superficie del materasso sia uniforme.

Il materasso deve essere stabile e non in modalità di funzionamento alternato mentre il paziente viene girato, in modo che questi venga posizionato correttamente.



Tutte le valvole per le lesioni devono essere chiuse e rivolte verso l'alto, affinché tutte le celle del materasso siano gonfie.



Selezionare la modalità Statica. La modalità Statica è confermata dall'accensione della spia gialla sul pulsante.




Le valvole per le lesioni devono essere aperte solo quando specifiche celle devono rimanere sgonfie per lunghi periodi. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del prodotto.



Controllo del comfort impostato su Rigido.

2

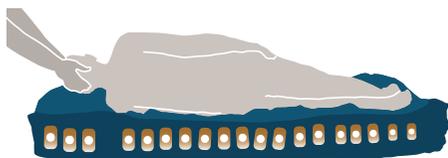

Qualora occorra sgonfiare la sezione della testa, aprire le valvole per le lesioni poste sulle tre celle della sezione della testa per sgonfiarle.

La persona responsabile della gestione delle vie aeree e del posizionamento della testa deve posizionarsi presso la testiera del letto per coordinare la procedura di rotazione.

Spostare il paziente su un lato del letto, fino a quando è sicuro e comodo. Ruotare il paziente in posizione laterale.



Aprire le valvole per le lesioni sulle tre celle della sezione della testa in modo da sgonfiarle, qualora sia necessario lo sgonfiaggio di tale sezione.



Mantenere la modalità Statica.




Tutte le altre valvole per le lesioni devono rimanere chiuse in questo momento.



Il Controllo del comfort rimane impostato su Rigido.

3

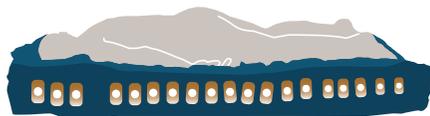

Sostenendo la testa del paziente, ruotare lentamente il paziente in posizione prona.

Le spalle del paziente devono essere posizionate sopra la 4a cella dal lato testa del materasso.

Assicurarsi che le linee e le apparecchiature di monitoraggio non rimangano intrappolate sotto il corpo del paziente.

Sistemare la posizione della testa usando cuscini, cuscinetti in gommapiuma o gel in modo da raggiungere una postura confortevole senza iperestensione.



Tutte le valvole per le lesioni devono essere rivolte verso l'alto (tutte le celle gonfie), ad eccezione delle valvole per le lesioni della sezione della testa, che devono essere aperte qualora occorra sgonfiare la sezione della testa.



Rimane in modalità Statica.



Il Controllo del comfort rimane impostato su Rigido.

4



Selezionare la modalità Alternata premendo il pulsante della modalità Statica. La spia gialla non è più accesa.

Posizionare gli arti e la testa del paziente come indicato dal protocollo di posizione prona dell'ospedale.

Con la tecnologia Wound Valve, è possibile sgonfiare specifiche celle d'aria per scaricare la pressione dalle aree sensibili del corpo, come per esempio le celle sotto le dita dei piedi e l'area genitale. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del prodotto.

Verificare regolarmente che il paziente non sia sottoposto ad accumuli di pressione, soprattutto in aree anatomiche sensibili.



Regolare le singole valvole per le lesioni secondo necessità per ottenere lo scarico della pressione in punti anatomici specifici.

- Sgonfiare solo una cella nella sezione dorso.

- Sgonfiare solo una cella nella sezione polpacci/talloni.

Non sgonfiare altre celle in ciascuna area o ciò può avere effetti sul sostegno dato al paziente durante il normale ciclo di alternanza.



Selezionare la modalità Alternata premendo una volta il pulsante Statica. La spia gialla non è più accesa.



Controllo del comfort impostato come appropriato.