

Nimbus 4 & Nimbus Professional

Установка матраса и насоса

1

Разместите матрас на основании кровати, так чтобы трубки и СЛР (CPR) находились на ножном конце. С помощью фиксирующих ремней прикрепите матрас к подвижным частям каркаса кровати.

2

Застегните защитный чехол на матрасе так, чтобы логотип Arjo был виден и находился на ножном конце.

3

Закрит Открыт

Убедитесь, что все выпускные клапаны закрыты.

4

Ручка управления транспортировкой должна быть установлена в положение Обычный режим (Normal), а ручка управления СЛР (CPR) должна быть закрыта и зафиксирована на месте.

5

Прикрепите кроватиный кронштейн к каркасу кровати или поместите насос под кровать.

6

Присоедините трубки к насосу и матрасу.

7

Присоедините сетевой кабель электропитания к насосу и розетке электросети.

8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кабель сетевого питания и трубки необходимо расположить так, чтобы о них нельзя было споткнуться и они не попадали в подвижные механизмы кровати и другие места, где они могут застрять.

Пропустите шнур питания вдоль боковой стороны матраса и зафиксируйте его в клапане, застегнув кнопки.

Накачивание матраса

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ручка управления СЛР (CPR) должна быть всегда видна и доступна.

- Ручка СЛР (CPR) закрыта и зафиксирована.
- Ручка управления транспортировкой установлена в положение Обычный режим (Normal).
- Все выпускные клапаны закрыты.

2

Нажмите кнопку «Пуск/готовность». Подождите, пока матрас полностью накачается.

3

После отключения индикаторов ожидания и низкого давления поместите пациента на матрасе в положение лежа на спине (лицом вверх). По умолчанию установлен динамический режим (переменное давление).

Включение СЛР (CPR)

1



Поднимите красную ручку на панели управления в ножном конце матраса.

2



Поверните ручку против часовой стрелки.

3




Потяните ручку в противоположную от панели сторону. Серая треугольная заслонка повернется, и воздух выйдет из матраса.

Сброс СЛР (CPR)

1


Поверните серую треугольную заслонку по часовой стрелке и толкните в разъем.

2



Поверните красную ручку по часовой стрелке.

3



Зафиксируйте ручку в этом положении.

Переключение в режим транспортировки

1




Поверните ручку управления транспортировкой в положение Транспортировка (Transport).

2



Отключите насос.

3

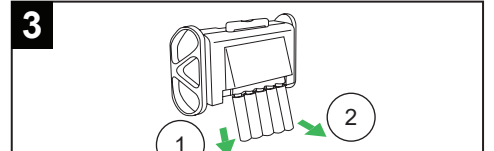

Отсоедините трубки. Матрас обеспечивает опору для пациента до 12 часов.

Восстановление обычного режима работы

1




Снова подключите трубки.

2



Поверните ручку управления транспортировкой в положение Обычный режим (Normal).

3



Включите насос.

Очистка и дезинфекция

В процессе использования проводите очистку и дезинфекцию после каждого пациента, а также с регулярными интервалами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением очистки отключите помпу от электрической сети, вынув вилку шнура питания из розетки.

При проведении дезинфекции необходимо надевать защитную одежду.

Очистка

1. Очистите все поверхности, подверженные загрязнению, и протрите поверхность тряпкой, смоченной в нейтральном моющем средстве и воде, чтобы удалить загрязнения.
2. Вытрите насухо. Не допускайте скопления воды или чистящего раствора на поверхности помпы.

Химическая дезинфекция

Используйте выделяющий хлор реагент, например гипохлорит натрия с концентрацией хлора 1000 ppm (концентрация может варьироваться от 250 до 10 000 ppm в зависимости от местных норм и интенсивности загрязнения).

В качестве альтернативного варианта могут быть использованы дезинфицирующие средства на основе спирта (концентрация 70 %).

При выборе альтернативного дезинфицирующего средства перед использованием следует получить подтверждение пригодности к использованию от поставщика химического средства.

1. Протрите все очищаемые поверхности раствором.
2. Протрите тряпкой, смоченной в воде.
3. Вытрите насухо.

Термическая дезинфекция

Инструкции по стирке чехла матраса см. на этикетке.