


# Enterprise 5000X



## Plejepersonalets kontrolpanel (PKP)

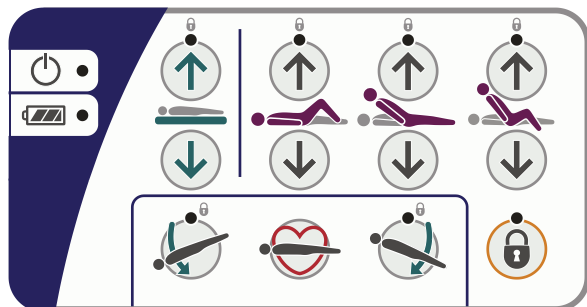

Strømindikator

Batteristatusindikator (LED)

fuldt opladet

oplader

afladet

**CPR-knap** – anbringer liggefladen i flad position.

Sænk hovedgærdet (Trendelenburg-position).


Sænk fodenden (omvendt Trendelenburg-position).

**Funktionslåseknap** – tryk på knappen, og tryk derefter på knappen eller knapperne på plejepersonalets kontrolpanel for at låse eller oplåse funktionen. Gult lys = låst

**Auto-Chair-knappen "Op"** – tryk på og hold knappen nede for at indstille stoleposition.

**Auto-Chair-knappen "Ned"** – returnerer liggefladen til en flad og vandret position.

## Håndbetjeninger til plejemodtagere

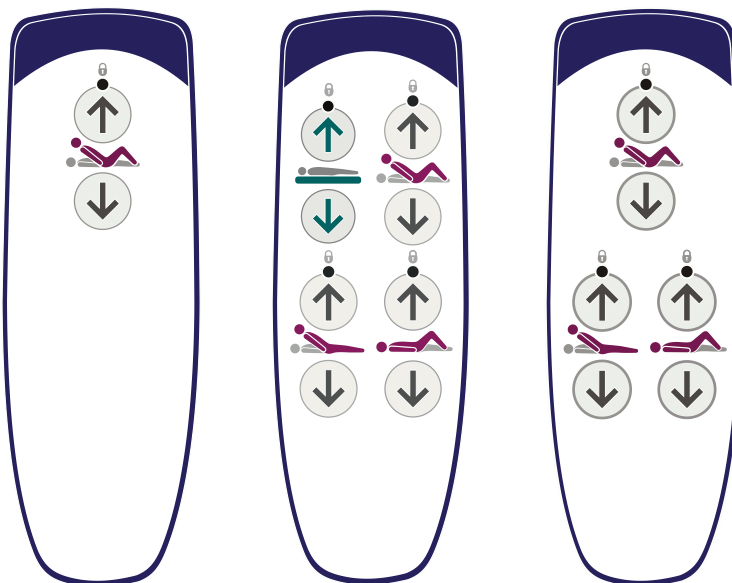

Hæv/sænk liggefladen.



Hæv/sænk lårsektionen.



Hæv/sænk ryglænet.



**Bio-Contour-knappen "Op"** (kun plejemodtagerens håndbetjening) – hæver ryglæns- og lårsektionerne.

**Bio-Contour-knappen "Ned"** (kun plejemodtagerens håndbetjening) – returnerer til flad position.