


## Enterprise 5000X



## Bedieningspaneel zorgverlener

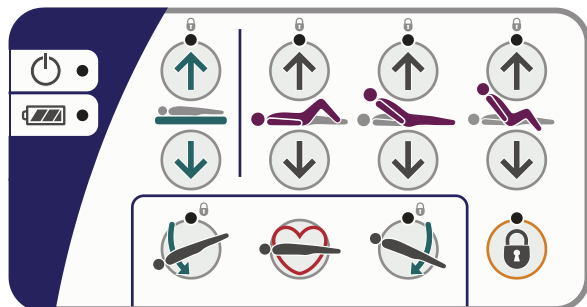

Aan/uit-indicator

Led-indicator batterijstatus

volledig geladen

laden

ontladen

**CPR-knop** – zet het ligvlak in de vlakke stand.

Lager hoofdeinde  
(Trendelenburg-positie).


Lager voeteneinde  
(anti-Trendelenburg-positie).

**Functievergrendelingsknop** – druk op de knop en druk vervolgens op de geselecteerde Bedieningspaneelknop(pen) om de functie te vergrendelen/ontgrendelen.  
Geel lampje = vergrendeld

**Knop Automatische zitstand omhoog**  
– houd ingedrukt voor zitstand.

**Knop Automatische zitstand omlaag**  
– ligvlak opnieuw in vlakke stand zetten.

## Afstandsbediening voor de zorgvrager

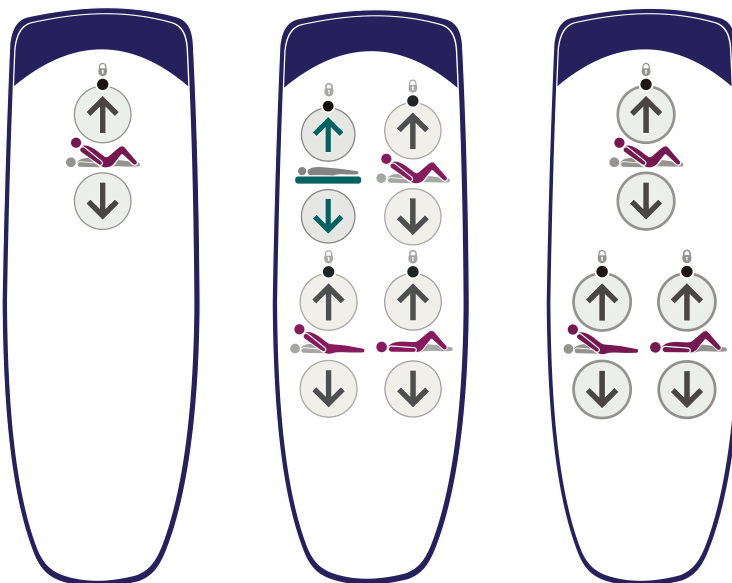

Het ligvlak omhoog/omlaag brengen.

Het dijgedeelte omhoog/omlaag brengen.

De rugsteun omhoog/omlaag brengen.

**Knop Bio-Contour omhoog**  
(bediening enkel door zorgvrager) – rugsteun en dijgedeelte omhoog brengen.

**Knop Bio-Contour omlaag**  
(bediening enkel door zorgvrager) – opnieuw naar vlakke stand brengen.