


Enterprise 5000X



Панель управления для лица, осуществляющего уход (АСР)

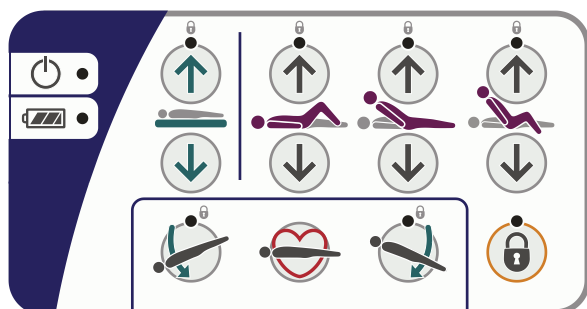

Индикатор питания



Индикатор состояния батареи



● полностью заряжено



● заряжается



● разряжено



Кнопка «СЛР» — приводит матрасную платформу в плоское положение.



Нижний головной конец (положение Тренделенбурга).



Нижний ножной конец (обратное Тренделенбургу положение).



Кнопка блокировки функции — чтобы заблокировать/разблокировать функцию, нажмите кнопку, затем нажмите выбранные кнопки панели управления для лица, осуществляющего уход. Горит желтым = заблокировано




Кнопка «Автокресло вверх» — нажмите и удерживайте до нужного изменения положения кресла.



Кнопка «Автокресло вниз» — возвращает матрасную платформу в плоское и горизонтальное положение.

Пульты управления пациента

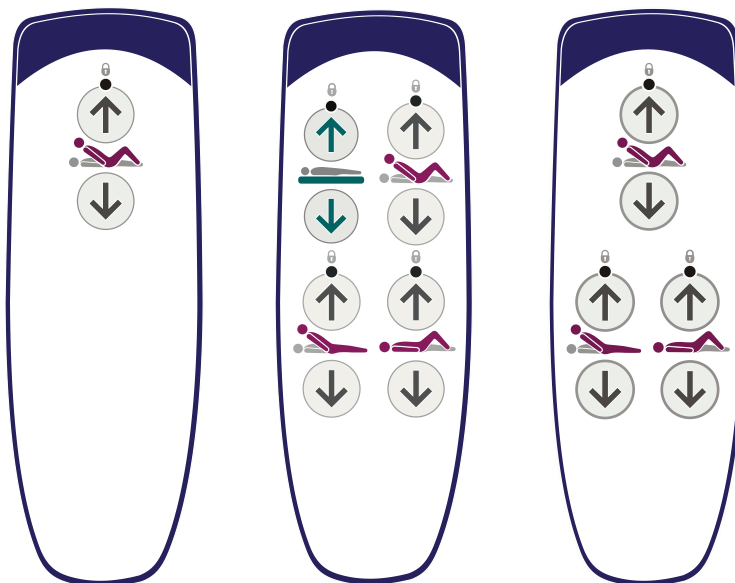

Подъем/опускание матрасной платформы.



Подъем/опускание секции бедер.



Подъем/опускание спинки.



Кнопка «Bio-Contour вверх» (только на пульте управления пациента) — подъем секций спинки и бедер.



Кнопка «Bio-Contour вниз» (только на пульте управления пациента) — возврат в горизонтальное положение.