


# Enterprise 5000X



## Personalmanöverpanel

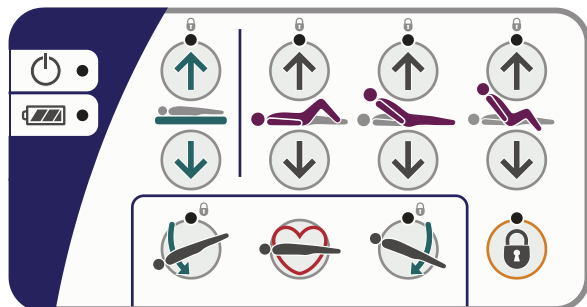

- Strömindikator
- Lysdiödsindikator för batteristatus
  - fulladdat
  - laddar
  - urladdat

**HLR-knapp** – gör madrassplattformen plan.

Sänka huvudändan (Trendelenburg-läge).


Sänka fotänden (omvänt Trendelenburg-läge).

**Funktionslåsknapp** – tryck på knappen och tryck sedan på knappen/knapparna på personalmanöverpanelen för att låsa/låsa upp funktionen. Gul lampa = låst

**Knapp för autostol upp** – håll intryckt för stolposition.

**Knapp för autostol ned** – tar tillbaka madrassplattformen till plant och horisontellt läge.

## Handenheter för patient

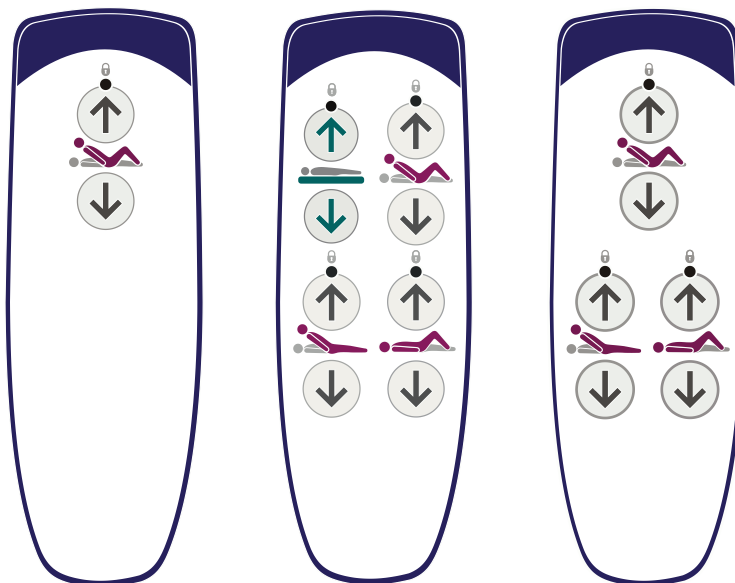

Höja/sänka madrassplattformen.

Höja/sänka låarsektionen.

Höja/sänka ryggstödet.

**Knapp för Bio-Contour upp** (endast patienthandkontroll) – höja ryggstöd och låarsektion.

**Knapp för Bio-Contour ned** (endast patienthandkontroll) – tillbaka till plant läge.