

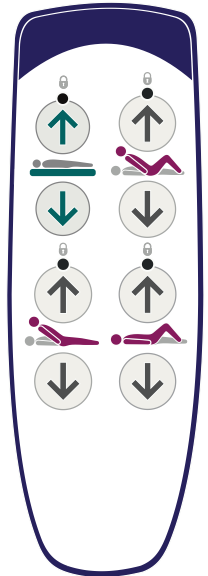


Enterprise 8000X

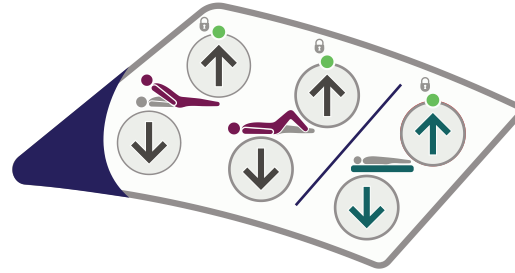


Pannello Controllo Operatore (ACP) Comandi per l'assistente


Pulsantiera del paziente (esempio)

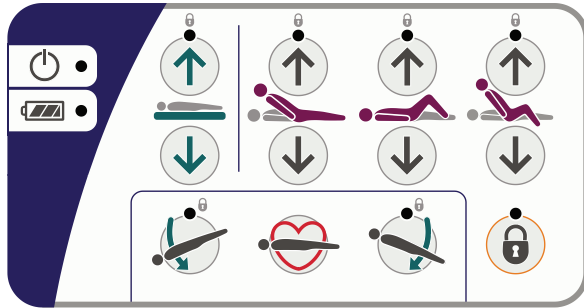

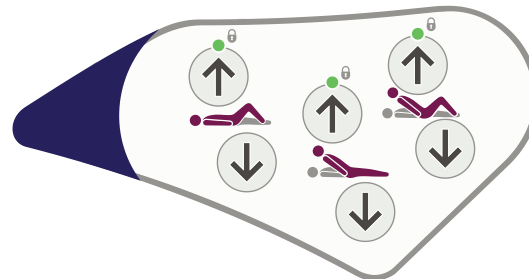

Comandi per il paziente





-  Indicatore accensione
-  Indicatore LED di stato della batteria
 -  ● completamente carica
 -  ● in carica
 -  ● scarica


 **Pulsante RCP** - mette il pianale portamaterasso in posizione orizzontale.


 Abbassamento del lato testa (posizione di Trendelenburg).


 Abbassamento del lato piedi (posizione anti-Trendelenburg).


 **Pulsante di blocco funzioni** - premere il pulsante, quindi premere il pulsante o i pulsanti selezionati del Pannello Controllo Operatore per bloccare/sbloccare la funzione. Spia gialla = bloccato


 **Pulsante Auto-Chair freccia in su** - tenere premuto per raggiungere la posizione seduta.


 **Pulsante Auto-Chair freccia in giù** - riporta il pianale portamaterasso in posizione orizzontale.

 Sollevare/abbassare il pianale portamaterasso.

 Sollevare/abbassare la sezione femorale.

 Sollevare/abbassare lo schienale.

 **Pulsante Bio-Contour freccia in su** (comando solo per il paziente) - solleva lo schienale e la sezione femorale.

 **Pulsante Bio-Contour freccia in giù** (comando solo per il paziente) - riporta il pianale portamaterasso in posizione orizzontale.