



Enterprise 9000X




Plejepersonalets kontrolpanel (PKP)

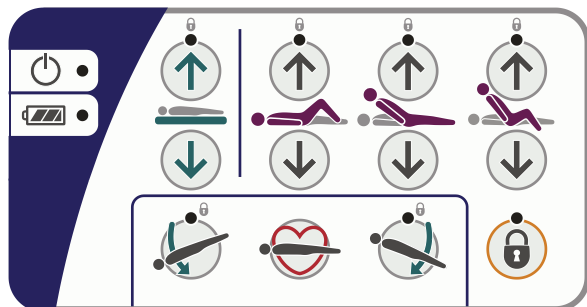


Plejepersonalets kontrolenhed

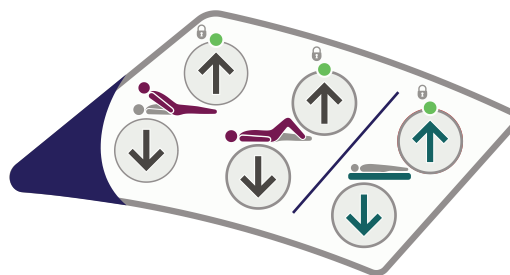

Plejemodtagerhåndsat

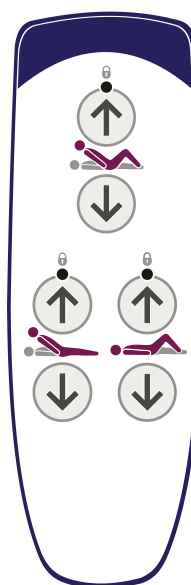

Plejemodtagerens betjeningspanel

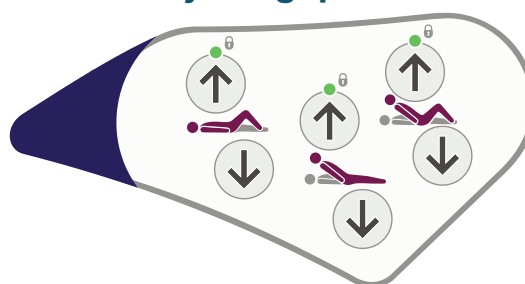

Strømindikator



Batteristatusindikator (LED)



fuldt opladet



oplader



afladet



CPR-knap – anbringer liggefladen i flad position.



Sænk hovedgærdet (Trendelenburg-position).



Sænk fodenden (omvendt Trendelenburg-position).



Funktionslåseknap – tryk på knappen, og tryk derefter på knappen eller knapperne på plejepersonalets kontrolpanel for at låse eller oplåse funktionen.
Gult lys = låst



Auto-Chair-knappen "Op" – tryk på og hold knappen nede for at indstille stoleposition.



Auto-Chair-knappen "Ned" – returnerer liggefladen til en flad og vandret position.



Hæv/sænk liggefladen.



Hæv/sænk lårsektionen.




Hæv/sænk ryglænet.



Bio-Contour-knappen "Op" (kun plejemodtagerens håndbetjening) – hæver ryglæns- og lårsektionerne.

Bio-Contour-knappen "Ned" (kun plejemodtagerens håndbetjening) – returnerer til flad position.

Vejning af plejemodtager og VariZone-betjeningselementer til bevægelsesregistrering

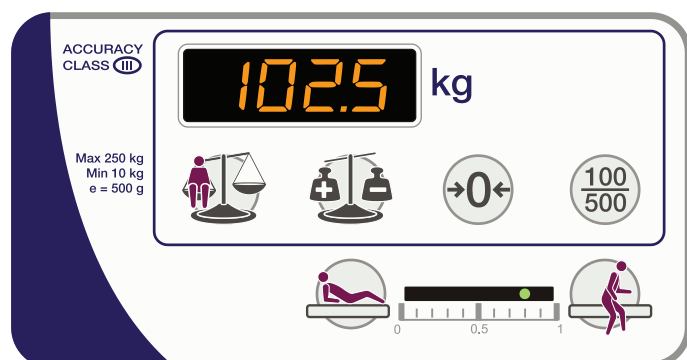

Vægt – beregner og viser plejemodtagerens vægt.



Autokompensation – gør det muligt at tilføje eller fjerne genstande, uden at det påvirker den viste plejemodtagervægt.



Nul – nulstiller vejesystemet.



Vælg vægtvisning – afrunder plejemodtagerens vægt til nærmeste 100 g eller 500 g.



I sengen – aktiverer/deaktiverer registrering af plejemodtagerens bevægelser og øger systemets følsomhed.



Display for grænseværdi for registrering af plejemodtagerbevægelse – en indikator viser aktuel systemstatus og den valgte følsomhed for registrering af plejemodtagerens bevægelser.



Udstigning – aktiverer/deaktiverer registrering af plejemodtagerens bevægelser og sænker systemets følsomhed.

