



Enterprise 9000X


Bedieningspaneel zorgverlener

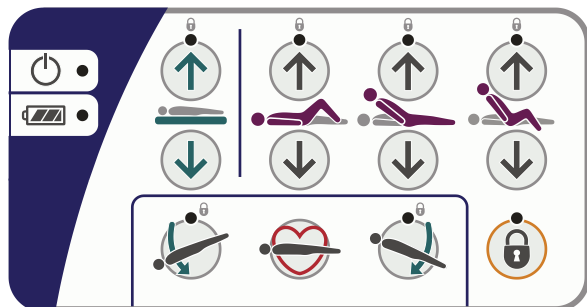


Bedieningspaneel zorgvrager

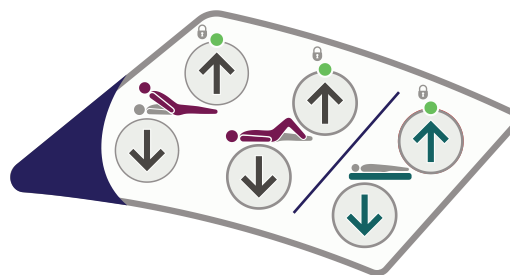

Handbediening voor de zorgvrager

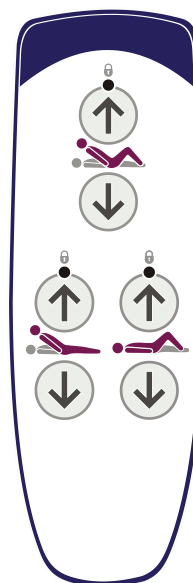

Bediening voor de zorgvrager

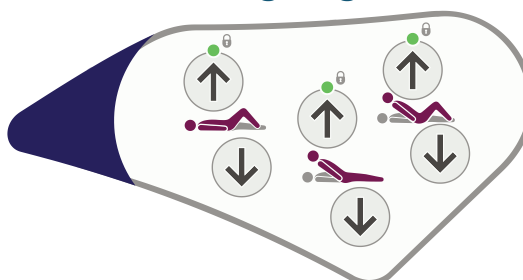

Aan/uit-indicator

Led-indicator batterijstatus

volledig geladen

laden

ontladen

CPR-knop – zet het ligvlak in de vlakke stand.

Lager hoofdeinde (Trendelenburg-positie).

Lager voeteneinde (anti-Trendelenburg-positie).

Functievergrendelingsknop – druk op de knop en druk vervolgens op de geselecteerde Bedieningspaneelknop(pen) om de functie te vergrendelen/ontgrendelen. Geel lampje = vergrendeld

Knop Automatische zitstand omhoog – houd ingedrukt voor zitstand.

Knop Automatische zitstand omlaag – ligvlak opnieuw in vlakke stand zetten.



Het ligvlak omhoog/omlaag brengen.



Het dijgedeelte omhoog/omlaag brengen.



De rugsteun omhoog/omlaag brengen.




Knop Bio-Contour omhoog (bediening enkel door zorgvrager) – rugsteun en dijgedeelte omhoog brengen.



Knop Bio-Contour omlaag (bediening enkel door zorgvrager) – opnieuw naar vlakke stand brengen.

Wegen van de zorgvrager en Varizone bewegingsdetectiebediening

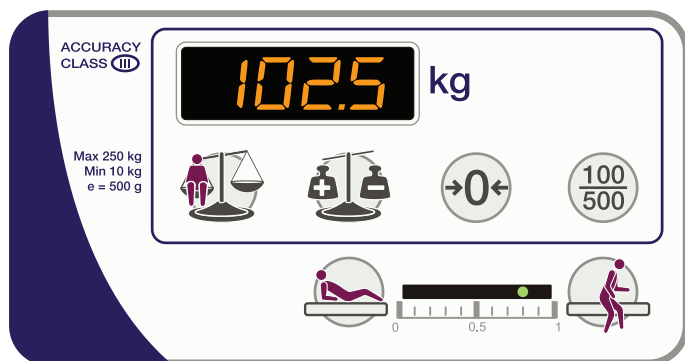

Wegen – het gewicht van de zorgvrager berekenen en weergeven.



Autocompensatie – items toevoegen of verwijderen zonder invloed op het aangegeven gewicht van de zorgvrager.




Nul – weegsysteem resetten.



Weegdisplay selecteren – rondt het gewicht van de zorgvrager af op 100 g of 500 g.



In bed – detectie van de zorgvragerbeweging activeren/deactiveren en de gevoeligheid van het systeem verhogen.

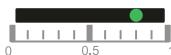

Weergave detectiedrempelwaarde voor zorgvragerbeweging – een indicator geeft de huidige status van het systeem weer, alsook de geselecteerde gevoeligheid van het systeem voor de detectie van zorgvragerbeweging.



Uitstappen – detectie van de zorgvragerbeweging activeren/deactiveren en de gevoeligheid van het systeem verlagen.