



Rama łóżka Citadel




Panel sterowania dla opiekuna

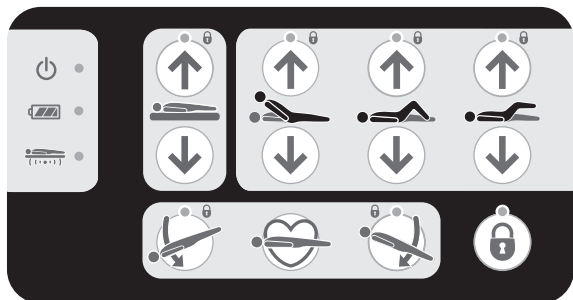


Panel sterowania dla pielęgniarki

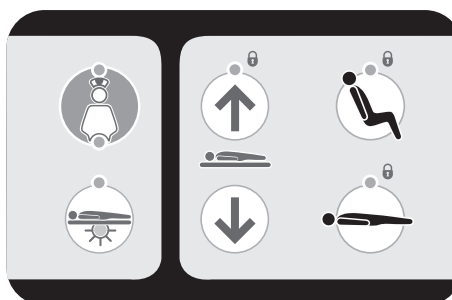

Pilot dla pacjenta

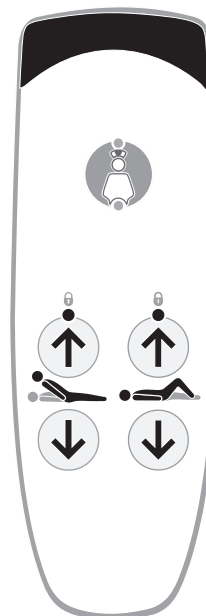

Panel sterowania dla pacjenta

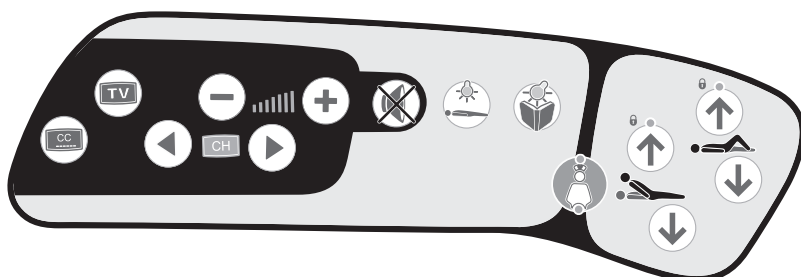

- **Wskaźnik włączonego zasilania**
Świeci na zielono po włączeniu zasilania.



- **Wskaźnik LED statusu naładowania baterii**

- w pełni naładowany
- ładowanie
- rozładowany



- **Wskaźnik systemu antyzakleszczeniowego (AES)**
Czerwone światło: system AES jest aktywny, a obniżenie ramy wymaga najpierw usunięcia przeszkody.



- **Wysokość łóżka**
Naciskając, można zwiększać i zmniejszać wysokość łóżka.



- **Kąt oparcia pleców**
Naciskając, można podnosić i obniżać oparcie pleców.



Segment podparcia ud —
te przyciski podnoszą i obniżają segment podparcia ud.

Segment podparcia łydek
Te przyciski podnoszą i obniżają segment podparcia łydek.

Pozycja Trendelenburga
Nacisnąć, aby obniżyć wezglowie łóżka.

Odwrócona pozycja Trendelenburga
Nacisnąć, aby obniżyć łóżko po stronie nóg.

Pozycja CPR
Nacisnąć, aby spłaszczyć platformę materaca.

Blokada funkcji
Nacisnąć ten przycisk, a następnie nacisnąć wybrany przycisk (przyciski) panelu sterowania dla opiekuna, aby zablokować/odblokować daną funkcję. Żółta kontrolka = blokada



Automatyczne krzesło

Nacisnąć i przytrzymać, aby uzyskać pozycję krzesła (tylko panel sterowania dla pielęgniarki).



Automatyczne opuszczenie krzesła

Nacisnąć i przytrzymać, aby powrócić na podłogę (tylko panel sterowania dla pielęgniarki).



Oświetlenie pod łóżkiem

(tylko panel sterowania dla pielęgniarki).



System wzywania pielęgniarki

Nacisnąć, aby wezwać pomoc (funkcja dostępna dla wybranych modeli).



Lampka do czytania

Nacisnąć, aby włączyć światło (funkcja dostępna dla wybranych modeli).



Lampka do czytania włączona/wyłączona

(dostępne dla wybranych modeli).



Dźwięk włączony/wyłączony (wyciszenie)

(dostępne dla wybranych modeli).



Ciszej

(dostępne dla wybranych modeli).



Głośniej

(dostępne dla wybranych modeli).



Kanał do przodu

(dostępne dla wybranych modeli).



Kanał do tyłu

(dostępne dla wybranych modeli).



Telewizor włączony/wyłączony



(dostępne dla wybranych modeli).



Duże napisy włączone/wyłączone

(dostępne dla wybranych modeli).

Panel sterowania wagą

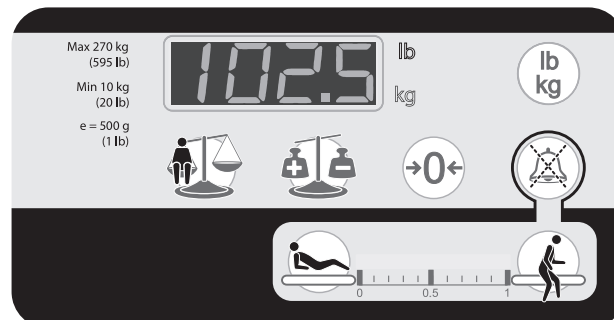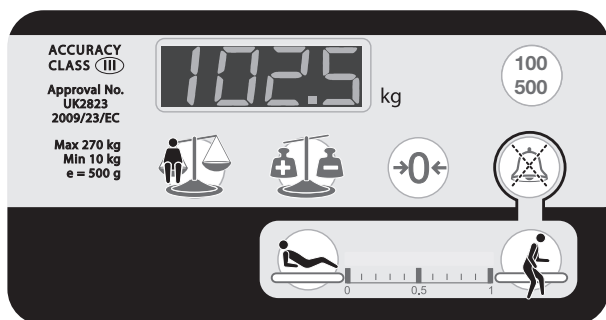

Panele wagi (w zależności od kraju)



Zerowanie

Służy do resetowania systemu ważenia przy pierwszej konfiguracji łóżka oraz przed umieszczeniem na nim nowego pacjenta.



Autokompensacja (tara)

Umożliwia położenie lub zdjęcie przedmiotów z łóżka bez wpływu na wyświetlaną wagę pacjenta.



Ważenie

Wyświetla wynik pomiaru masy.



Wybieranie trybu wyświetlania wagi

Zaokrąglenie do najbliższych 100 g lub 500 g.



Wybór jednostek

Pozwala wybrać jednostkę masy.

Próg wykrywania ruchu pacjenta

Wskaźnik prezentuje wybraną czułość wykrywania ruchu pacjenta.



W łóżku

Aktywuje/dezaktywuje wykrywanie ruchu pacjenta oraz zwiększa czułość systemu.



Wyjście

Aktywuje/dezaktywuje wykrywanie ruchu pacjenta oraz zmniejsza czułość systemu.



Przycisk wyciszania VariZone™

Wycisza sygnalizację wyjścia z łóżka na trzy minuty.