

Av/på-knapp

Hold knappen inne i to sekunder for å slå på eller av.



Sperreknapp

Hold knappen inne i to sekunder for å aktivere eller deaktivere sperring av alle funksjoner.



Sengehest nede-indikator

Indikerer at venstre eller høyre sengehest er senket.



Fowler-vinkelindikator

Tennes når Fowler-vinkelen er større enn 30°.



Alarmindikator

Indikerer at en alarmbetingelse er til stede.



Demp/fjern alarm-knapp

Trykk for å fjerne en alarmindikator eller bekrefte en alarm.



Knapp for tømning av setedel

Trykk for å aktivere eller deaktivere tømning av setedelen.



Knapp for tømning av hodedel

Trykk for å aktivere eller deaktivere tømning av hodedelen.



Fast madrass-knapp

Trykk for å aktivere eller deaktivere fast madrass-funksjonen.



Knapp for pasienttransport

Trykk for å aktivere eller deaktivere pasienttransport.

Vending



Knapp for pasientvending mot høyre (pleierassistanse)

Trykk for å vende pasienten 20° mot høyre (for pasienten).



Knapp for sentrering av pasient

Trykk for å returnere fra vendeposisjon til flatt liggende.



Knapp for pasientvending mot venstre (pleierassistanse)

Trykk for å vende pasienten 20° mot venstre (for pasienten).



30 min

Kontinuerlig pasientvending

Knapp for holdetid (valgfri konfigurasjon)

Trykk for å starte kontinuerlig pasientvending.



15 min




8 min



2 min




Justering av lufttrykk

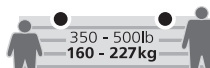

Forhåndsinnstillinger for høyde/vekt

Trykk på knappen for å velge pasientens kroppstype og vekt.

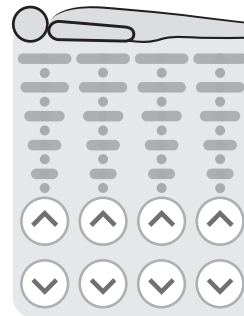


Trykksoneindikatorer

Trykk på pil opp for å øke trykket.

Trykk på pil ned for å redusere trykket.

Pulsering/alternerende trykkbehandling (tillegg)

Alternerende trykk

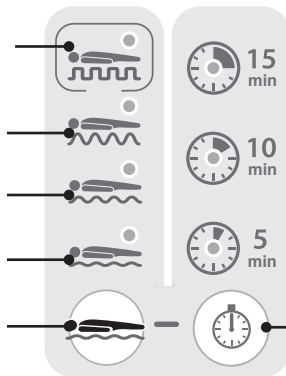

Høy pulsering

Middels pulsering

Middels pulsering

Knapp for pulsering/ behandling med alternerende trykk

Knapp for pulsering / syklustid ved alternerende trykk



Knapp for pulsering/behandling med alternerende trykk

Trykk for å justere intensiteten i pulseringsbehandlingen.



Knapp for pulsering/syklustid ved alternerende trykk

Trykk for å velge syklustid for pulseringen.

