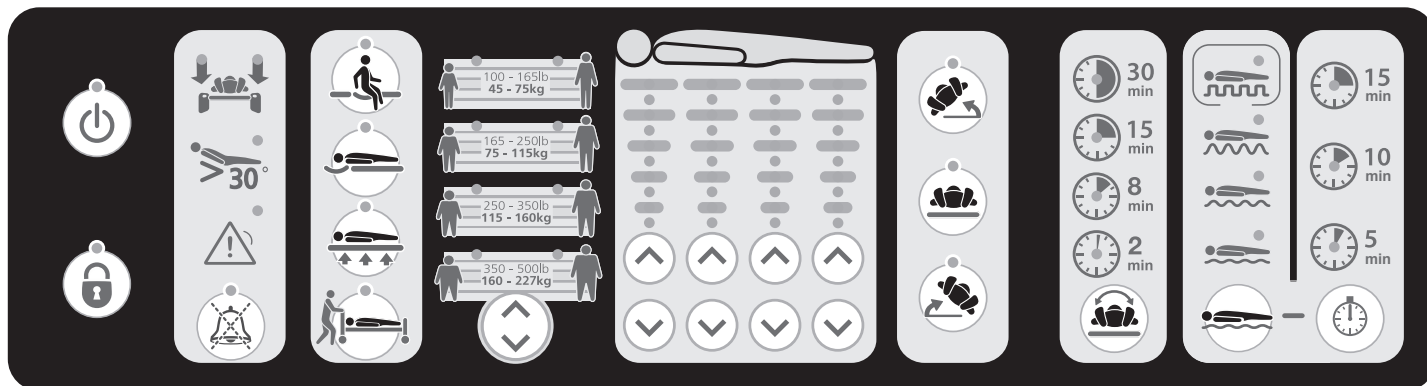


System terapeutyczny **Citadel****Przycisk włączania / wyłączenia**

Naciśnięcie i przytrzymanie przez dwie sekundy spowoduje włączenie lub wyłączenie zasilania.

**Przycisk wyciszenia / kasowania alarmu**

Naciśnięcie spowoduje skasowanie wskaźnika alarmu lub potwierdzenie alarmu.

**Przycisk funkcji blokady**

Naciśnięcie i przytrzymanie przez dwie sekundy spowoduje włączenie lub wyłączenie wszystkich funkcji.

**Przycisk odpompowania sekcji siedzenia**

Naciśnięcie spowoduje włączenie lub wyłączenie spuszczenia powietrza z siedziska.

**Wskaźnik opuszczenia bocznej poręczy**

Świeci się po opuszczeniu lewej lub prawej bocznej poręczy.

**Przycisk odpompowania sekcji wezłowania**

Naciśnięcie spowoduje włączenie lub wyłączenie spuszczenia powietrza z sekcji wezłowania.

**Wskaźnik kąta Fowlera**

Świeci się, gdy kąt Fowlera przekracza 30°.

**Przycisk utwardzania materaca**

Naciśnięcie spowoduje włączenie lub wyłączenie funkcji utwardzania materaca.

**Wskaźnik alarmu**

Wskazuje stan alarmowy.

**Przycisk transportu pacjenta**

Naciśnięcie spowoduje włączenie lub wyłączenie funkcji transportu pacjenta.

## Obracanie



**Przycisk Obróć pacjenta w prawo (asysta pielęgniarki)**  
Naciśnięcie spowoduje obrót pacjenta o 20° w jego prawą stronę.



**Przycisk Pacjent na środku**  
Naciśnięcie spowoduje obrót pacjenta z pozycji obróconej do płaskiej.



**Przycisk Obróć pacjenta w lewo (asysta pielęgniarki)**  
Naciśnięcie spowoduje obrót pacjenta o 20° w jego lewą stronę.



30 min

**Ciągła rotacja boczna pacjenta (konfiguracja opcjonalna)**



15 min

Naciśnięcie spowoduje ciągłą rotację boczną pacjenta.



8 min




2 min



## Kontrolki do regulacji ciśnienia powietrza



**Wstępnie ustawiona wysokość / waga**  
Umożliwia wybór typu sylwetki i masy pacjenta.

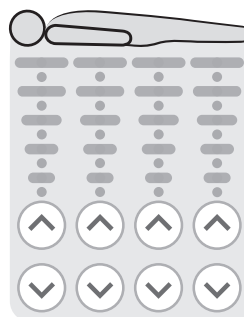


**Wskaźniki stref nacisku**  
Naciśnięcie strzałki do góry zwiększa ciśnienie.

Naciśnięcie strzałki w dół zmniejsza ciśnienie.

## Terapia pulsacyjna / zmiennie ciśnieniowa (opcja)

**Materace zmiennociśnieniowe**

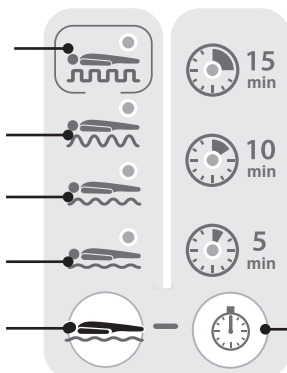

**Wysoka pulsacja**

**Średnia pulsacja**

**Średnia pulsacja**

**Przycisk Terapia pulsacyjna / zmiennie ciśnieniowa**

**Przycisk Czas pulsacji / cyklu AP**



**Przycisk Terapia pulsacyjna / zmiennie ciśnieniowa**  
Umożliwia regulację terapii pulsacyjnej.



**Przycisk Czas pulsacji / cyklu AP**  
Umożliwia wybór czasu cyklu pulsacji.