

Выключатель питания

Нажмите и удерживайте в течение двух секунд для включения или выключения.



Кнопка отключения/сброса сигнала тревоги

Нажмите, чтобы сбросить индикатор тревоги или подтвердить прием сигнала тревоги.



Кнопка блокировки

Нажмите и удерживайте в течение двух секунд для включения или выключения блокировки всех функций.



Кнопка выпуска воздуха из сиденья

Нажмите для включения или отключения выпуска воздуха из сиденья.



Индикатор опускания бокового ограждения

Показывает, что опущено левое или правое боковое ограждение.



Кнопка выпуска воздуха из головной секции

Нажмите для включения или отключения выпуска воздуха из головной секции.



Индикатор угла в положении Фовлера

Показывает, что угол в положении Фовлера превышает 30°.



Кнопка функции твердого матраса

Нажмите для включения или отключения функции твердого матраса.



Индикатор сигнала тревоги

Показывает наличие состояния тревоги.



Кнопка транспортировки пациента

Нажмите для включения или отключения функции транспортировки пациента.

Поворот



Кнопка поворота пациента вправо (помощь для медсестры)

Нажмите, чтобы повернуть пациента вправо на 20°.



Кнопка расположения пациента по центру

Нажмите, чтобы вернуть пациента из повернутого положения в ровное.



Кнопка поворота пациента влево (помощь для медсестры)

Нажмите, чтобы повернуть пациента влево на 20°.



30 min

Непрерывный поворот пациента

Кнопка времени удержания

(дополнительная конфигурация)

Нажмите, чтобы начать непрерывный поворот пациента.



15 min




8 min



2 min




Регуляторы давления воздуха

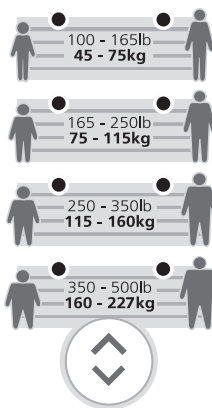

Предварительные настройки роста и веса

Нажмите кнопку, чтобы выбрать тип телосложения и массу пациента.

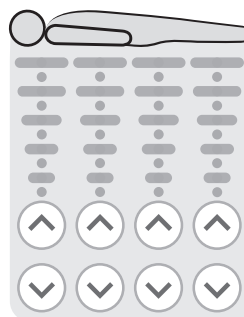


Индикаторы зон давления

Нажимайте стрелки вверх для увеличения давления.

Нажимайте стрелки вниз для уменьшения давления.

Терапевтическое воздействие пульсирующим / переменным давлением (дополнительно)

Переменное давление

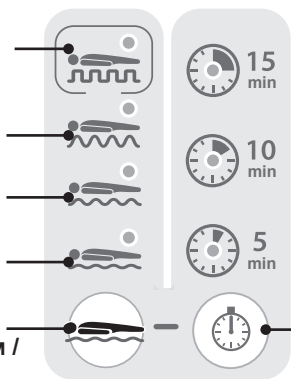

Сильные пульсации

Средние пульсации

Средние пульсации

Кнопка терапевтического воздействия пульсирующим / переменным давлением

Кнопка продолжительности цикла пульсаций / переменного давления



Кнопка терапевтического воздействия пульсирующим / переменным давлением

Нажмите для настройки интенсивности терапии пульсирующим давлением.



Кнопка продолжительности цикла пульсаций / переменного давления

Нажмите, чтобы выбрать продолжительность цикла пульсации.