



# Citadel Plus




## Plejepersonalets betjeningspanel

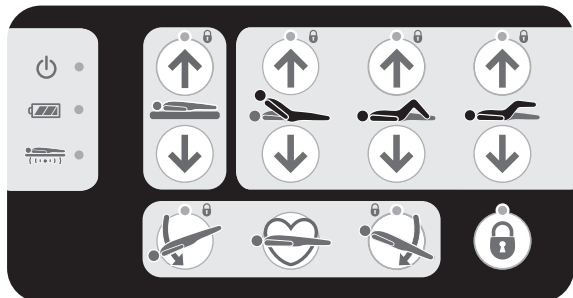


## Sygeplejerskens betjeningspanel

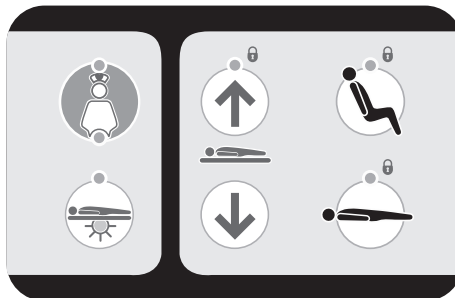



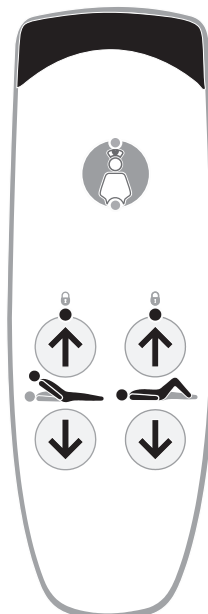



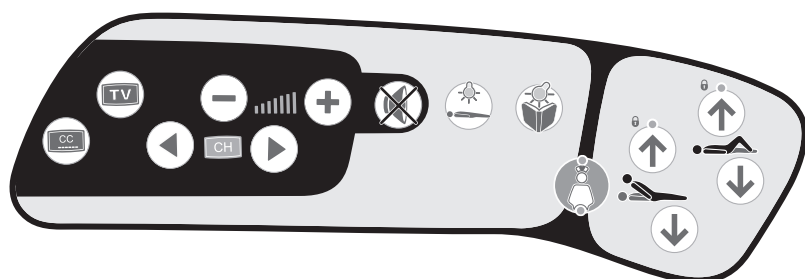

## Plejemedtagerhåndsæt



## Plejemedtagerens betjeningspanel



-  ● **Strømindikator**
-  ● **Batteristatusindikator (LED)**
  -  ● Batteri ladet helt op
  -  ● Batteri lader
  -  ● Batteri afladet
-  ● **Indikator for antifastklemnings-system (AES)** – Hvis indikatoren lyser, er AES-systemet blevet aktiveret, og hindringen skal fjernes, før rammen kan sænkes.
-  ● **Liggefladehøjde** – Hæver eller sænker liggefladen.
-  ● **Ryglænsvinkel** – Hæver eller sænker ryglænet.
-  ● **Lårsektion** – Hæver eller sænker lårsektionen.
-  ● **Lægsektion** – Hæver eller sænker lægsektionen.
-  ● **Sænk hovedgærdet** (Trendelenburg-position)
-  ● **Sænk fodenden** (omvendt Trendelenburg-position)
-  ● **CPR-position** – Retter liggefladen ud og sænker sengens højde.
-  ● **Funktionslås** – Tryk på knappen, og tryk derefter på knappen eller knapperne på plejepersonalets betjeningspanel for at låse eller oplåse funktionen. Gult lys = låst.



### Auto-Chair

(kun sygeplejerskens betjeningspanel)  
– Tryk og hold nede for at indstille stoleposition.



### Auto-Chair ned

(kun sygeplejerskens betjeningspanel)  
– Tryk og hold nede for at returnere til plan position.



### Lys under sengen

(kun sygeplejerskens betjeningspanel)



### Kaldesystem

(tilgængelig på udvalgte modeller)  
– Tryk for at tilkalde hjælp.



### Læselampe

(tilgængelig på udvalgte modeller)  
– Tryk for at tænde lyset.



### Tænd/sluk læselampe

(tilgængelig på udvalgte modeller)



### Lyd til/fra (lydløs)

(tilgængelig på udvalgte modeller)



### Lydstyrke ned

(tilgængelig på udvalgte modeller)



### Lydstyrke op

(tilgængelig på udvalgte modeller)



### Kanal ned

(tilgængelig på udvalgte modeller)



### Kanal op

(tilgængelig på udvalgte modeller)



### Tænd/sluk fjernsyn



(tilgængelig på udvalgte modeller)



### Undertekster til/fra

(tilgængelig på udvalgte modeller)

## Vægtbetjeningspanel

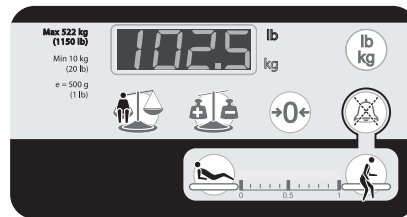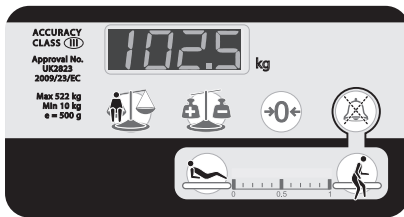

**Nul** – Tryk for at nulstille vejesystemet, når sengen indstilles første gang, og før en ny plejemodtager placeres på sengen.



**Autokompensation** – Tryk ved tilføjelse eller fjernelse af genstande til eller fra sengen for at undgå at påvirke den viste plejemodtagervægt.



**Vejning** – Tryk for at få vist vægten.



**Vælg enheder** – Tryk for at vælge vejeenhed.



**Knappen VariZone lydløs** – Tryk for at gøre udgangsalarmen lydløs i tre minutter.

**Grænseværdi for registrering af plejemodtagerbevægelse** – En indikator viser den valgte følsomhed for plejemodtagerbevægelse.



**I sengen** – Tryk for at genaktivere eller aktivere registrering af plejemodtagerens bevægelser og forøge følsomheden.



**Udstigning** – Tryk for at genaktivere eller aktivere registrering af plejemodtagerens bevægelser og reducere følsomheden.