



Citadel Plus


Anwender-Bedienfeld

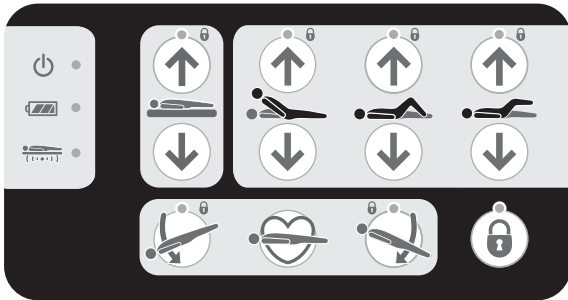


Bedienfeld für das Pflegepersonal

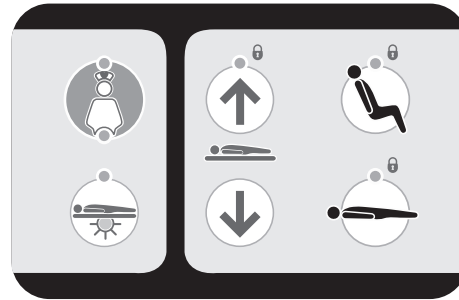

Fernbedienung für Patienten

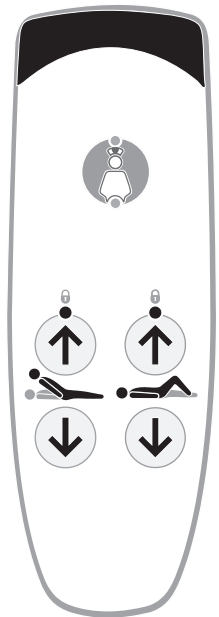

Bedienfeld für Patienten

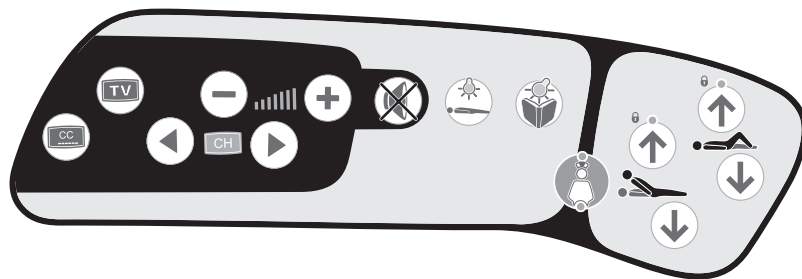

● **Netzkontrolllampe**



● **LED-Akkuladezustandsanzeige**



● Akku ist voll aufgeladen.



● Akku wird geladen.



● Akku ist vollständig entladen.



● **Einklemmschutzanzeige** – Bei leuchtender Anzeige wurde der Einklemmschutz aktiviert und das Hindernis muss entfernt werden, bevor sich der Rahmen absenkt.



● **Höhe der Liegefläche** – Liegefläche anheben oder absenken.



● **Rückenlehnenwinkel** – Rückenlehne anheben oder absenken.



● **Oberschenkelsegment** – Oberschenkelsegment anheben oder absenken.



● **Unterschenkelsegment** – Unterschenkelsegment anheben oder absenken.



● **Absenken des Kopfteils** (Trendelenburg-Position)



● **Absenken des Fußteils** (Anti-Trendelenburg-Position)



● **CPR-Position** – Liegefläche gerade stellen und Bethöhe absenken.



● **Funktionssperre** – Taste drücken und danach die gewünschte(n) Taste(n) auf dem Anwender-Bedienfeld drücken, um die Funktion zu sperren oder zu entsperren. Gelbes Licht = gesperrt



Auto-Chair

(nur auf dem Bedienfeld für Pflegepersonal) – Für Sitzposition gedrückt halten.



Auto-Chair nach unten

(nur auf dem Bedienfeld für Pflegepersonal) – Für Rückkehr in ebene Liegeposition gedrückt halten.



Unterbettbeleuchtung

(nur auf dem Bedienfeld für Pflegepersonal)



Schwesternruf

(bei ausgewählten Modellen) – Zur Anforderung von Hilfe drücken.



Leselampe

(auf ausgewählten Modellen) – Zum Einschalten der Lampe drücken.



Leselampe ein/aus

(auf ausgewählten Modellen)



Ton ein/aus (stumm)

(auf ausgewählten Modellen)



Leiser

(auf ausgewählten Modellen)



Lauter

(auf ausgewählten Modellen)



Kanal zurück

(auf ausgewählten Modellen)



Kanal weiter

(auf ausgewählten Modellen)



Fernseher ein/aus



(auf ausgewählten Modellen)



Untertitel für Hörgeschädigte ein/aus

(auf ausgewählten Modellen)

Bedienfeld der Personenwaage

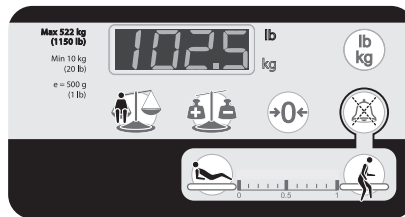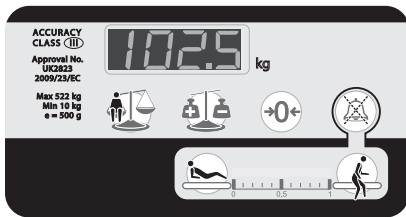

Null stellen – Zum Zurücksetzen des Wiegesystems drücken, wenn das Bett zum ersten Mal aufgebaut wird und bevor ein neuer Patient auf das Bett gelegt wird.



Autokompensation – Drücken, um Gegenstände zum Bett hinzuzufügen oder vom Bett zu entfernen, ohne das angezeigte Patientengewicht zu beeinflussen.



Wiegen – Zur Anzeige des Gewichts drücken.



Einheitenwahl – Zum Auswählen der Gewichtseinheit drücken.



VariZone-Stummtaste – Drücken, um den Bettausstiegsalarm für drei Minuten stumm zu schalten.

Schwellenwert der Patientenerfassung – Ein Indikator zeigt die gewählte Empfindlichkeit der Patientenerfassung an.



Im Bett – Drücken, um die Patientenerfassung aus- oder einzuschalten und die Empfindlichkeit zu erhöhen.



Ausstieg – Drücken, um die Patientenerfassung aus- oder einzuschalten und die Empfindlichkeit zu verringern.