



Citadel Plus




Pannello di controllo operatore

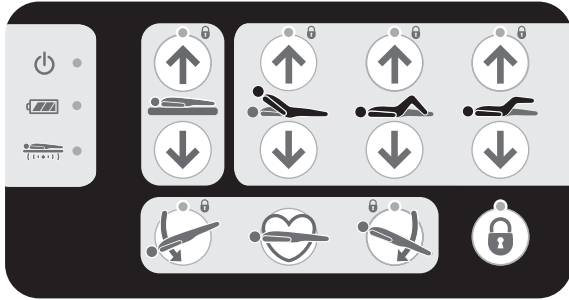


Pannello di controllo dell'infermiere

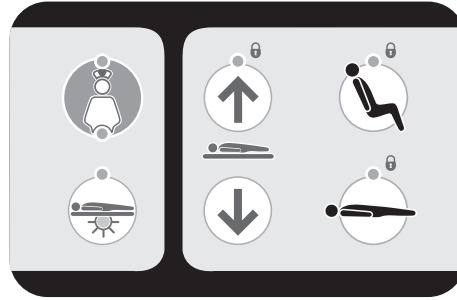



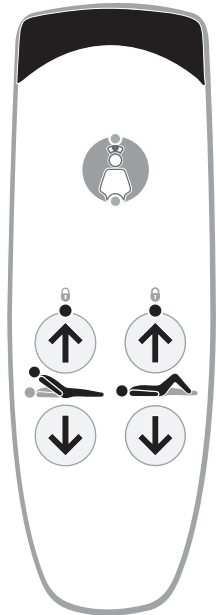



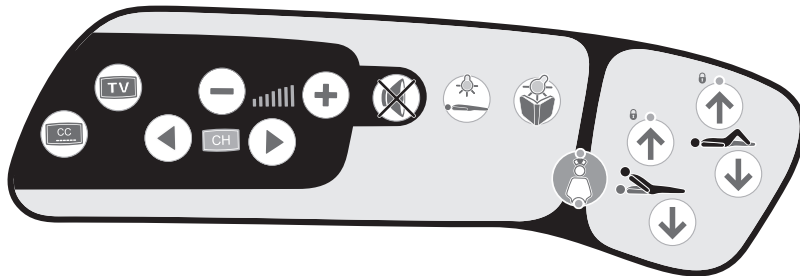







Pulsantiera paziente



Pannello di controllo del paziente



- 
● **Indicatore accensione**
- 
● **Indicatore LED di stato della batteria**
 -  ● Batteria completamente carica
 -  ● Caricamento della batteria
 -  ● Batteria scarica
- 
● **Indicatore del sistema anti-intrappolamento (AES)** - Quando è illuminato, il sistema AES è stato attivato e l'ostacolo deve essere rimosso prima che il telaio si abbassi.
- 
● **Altezza del pianale portamaterasso** - Consente di sollevare o abbassare il pianale portamaterasso.
- 
● **Angolo schienale** - Consente di sollevare o abbassare lo schienale.
- 
● **Sezione coscia** - Consente di sollevare e abbassare la sezione coscia.
- 
● **Sezione polpacci** - Consente di sollevare e abbassare la sezione polpacci.
- 
● **Abbassamento del lato testa** (posizione di Trendelenburg)
- 
● **Abbassamento del lato piedi** (posizione anti-Trendelenburg)
- 
● **Posizione RCP** - mette il pianale portamaterasso in posizione orizzontale e abbassa l'altezza del letto
- 
● **Pulsante di blocco funzioni** - Premere il pulsante, quindi premere il pulsante o i pulsanti selezionati del Pannello di controllo operatore per bloccare/sbloccare la funzione. Spia gialla = bloccato.



Auto-Chair

(solo pannello di controllo dell'infermiere)
- Tenere premuto per raggiungere la posizione seduta.



Auto-Chair freccia in giù

(solo pannello di controllo dell'infermiere)
- Tenere premuto per tornare in posizione orizzontale.



Luci di cortesia

(solo pannello di controllo dell'infermiere)



Chiamata infermiere

(disponibile sui modelli selezionati) -
Premere per richiedere assistenza.



Luce di lettura

(disponibile sui modelli selezionati) -
Premere per accendere la luce.



Luce di lettura accesa/spenta

(disponibile sui modelli selezionati)



Suono attivato/disattivato (muto)

(disponibile sui modelli selezionati)



Volume freccia in giù

(disponibile sui modelli selezionati)



Volume freccia in su

(disponibile sui modelli selezionati)



Canale precedente

(disponibile sui modelli selezionati)



Canale successivo

(disponibile sui modelli selezionati)



Televisione accesa/spenta



(disponibile sui modelli selezionati)



Sottotitoli per non udenti attivati/non attivati

(disponibile sui modelli selezionati)

Pannello di controllo della bilancia di pesatura

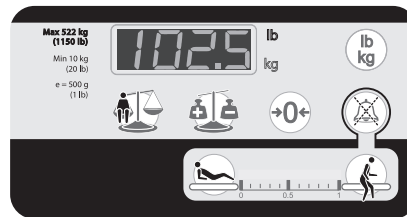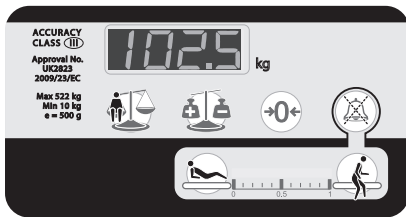

Zero - Premere per resettare il sistema di pesatura quando viene allestito il letto per la prima volta e prima che un nuovo paziente utilizzi il letto.



Autocompensazione - Premere per aggiungere o rimuovere articoli dal letto senza che ciò abbia effetto sul peso indicato del paziente.



Peso - Premere per visualizzare il peso.



Selezione unità - Premere per selezionare l'unità di pesatura.



Pulsante di silenziamento VariZone - Premere per disattivare l'allarme per tre minuti.

Soglia di rilevamento dei movimenti del paziente - Un indicatore mostra la sensibilità selezionata di movimento del paziente.



A letto - Premere per riattivare o attivare il rilevamento del movimento del paziente e aumentare la sensibilità.



Uscita dal letto - Premere per riattivare o attivare il rilevamento del movimento del paziente e diminuire la sensibilità.